



- 1. Håndtag
- 2. Bremses
- 3. Bremsesgreb
- 4. Bakke
- 5. Sæde

- 6. Kurv
- 7. Forhjul
- 8. Ramme
- 9. Baghjul
- 10. Foldsamen udløser

- 11. Stokkeholder
- 12. Højdejustering
- 13. Bremssekabel
- 14. Stokkeholder

Sikkerhedsinstruktioner

- Brug kun rollatoren som ganghjælpemiddel!
- Brug kun rollatoren på en jævn og fast overflade.
- Rollator må **ikke** bruges som sæde i køretøjer, såsom en bus eller tog!
- Det er forbudt at stå på rollatoren eller at transportere en person eller et dyr på rollatoren.
- Vær opmærksom på den tilladte maksimale vægt for brugeren. Disse oplysninger findes i de tekniske data i denne brugsanvisning samt på typeskiltet på rollatoren.
- Brug kun bakken til små, lette genstande, som ikke er skarpe eller varme. Maks. belastning: 5,0 kg
- Brug kun kurven til at transportere genstande og overfyld den ikke! Maks. belastning: 5,0 kg
- Brug på rulletrapper og lignende er udtrykkeligt forbudt!
- Skubbehåndtagene skal altid justeres parallelt med bevægelsesretningen – Ellers risiko for at vælte!
- Hæng ikke poser på håndtaget – risiko for at vælte!
- På stejle overflader, brug bremsegrebet (træk bremsehåndtaget opad).
- Hvis du læner dig for meget på håndtagene, kan det få rollatoren til at tippe bagud.
- Ved foldning/udfoldning af rollatoren kan tøj og kropsdele komme i klemme. Vær opmærksom.
- Beskyt rollatoren mod direkte sollys. Produktdele kan blive varme og forårsage hudskader ved berøring.
- Før hver brug skal du sikre dig, at din rollator er intakt, og at alle justerbare dele er ordentligt fastgjort. Tjek at bremserne fungerer korrekt!
- Før rollatoren tages i brug, skal det sikres, at rollatoren er korrekt foldet ud og låst.
- Kontroller regelmæssigt skruerne på rollatoren og spænd evt.
- Bremseeffekten kan forringes af slid på dækkene. Kontroller derfor bremsevirkningen og dækkene regelmæssigt.
- Rollatoren må IKKE bæres ved at holde på sædet, aftagelige dele eller bremsekablerne.

Udfoldning



Placer rollatoren på dens hjul. Du kan folde chassissrammen ud ved at trække i et af baghjulsrørene (1).

Skub krydsbøjlen lige ned (2), indtil den nemt klikker på plads. (foto 1).

Montering af tilbehør



Hæng kurven på de små kroge foran under sædet og sæt bakken ned med de små fødder i de små huller i sædedelen.

(foto 2).



Højdejustering af skubbehåndtag



Sæt håndtaget ind i rammerøret. (foto 3). Fastgør dem i den ønskede højde ved at dreje låsehåndtaget med uret. Juster begge håndtag til samme højde.


Skubbehåndtagene skal justeres parallel med bevægelsesretningen.

⚠ Den maksimale tilladte vinkel mellem håndtagets langsgående midterlinje og bevægelsesretningen er 0°.

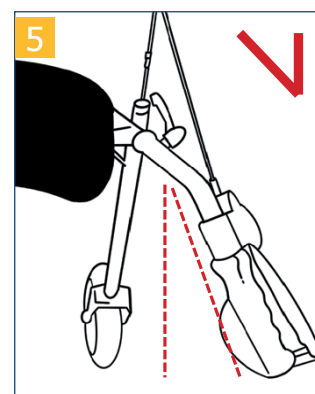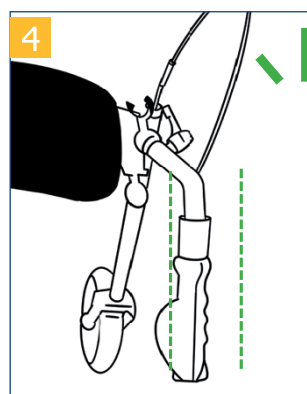

Selve låsehåndtagets position kan justeres ved at trække og dreje det samtidig. For at ændre højdeindstillingen af skubbehåndtagene skal du dreje låsegrebet mod uret for at frigøre fikseringen. Lås derefter håndtaget i den ønskede højde som beskrevet ovenfor.

Justering af bremsen

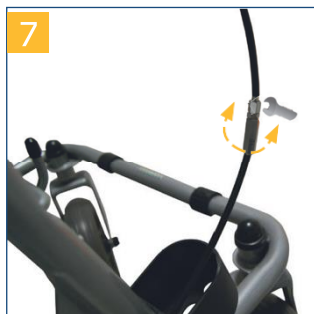


Hvis bremsen er dårlig eller for hård, kan bremsen justeres enten ved bremsehuset ovenfor (foto 6) eller ved hjælp af justeringsskruen på bremsekablet nedenfor (foto 7) for at opnå den ønskede bremseeffekt.

Bremsen er korrekt justeret, når såvel bremsegrebet som bremsewirerne er frie og hjulene kan drejes uden slibelyde, når bremsen slippes.

Bremsning og parkering

For at bremse, når du går med rollatoren, skal du trække begge bremsehåndtag opad med hænderne (foto 8). Brems altid langsomt, mens du trykker lige meget med begge hænder.

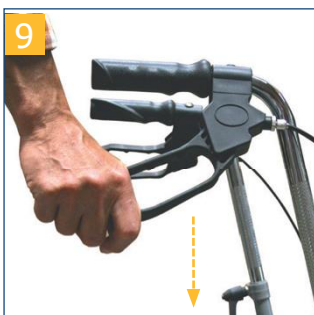

For at aktivere bremsene/parkere rollatoren skal du trykke begge bremsehåndtag nedad, indtil de hørligt klikker på plads (foto 9)! For at udløse bremsen skal du trække begge bremsehåndtag opad igen, indtil de slippes (bremsehåndtagene er i midterpositionen)).

Bremseeffekten kan forringes af slid på dækkene. Af denne grund skal du jævnligt kontrollere bremsevirkningen.

Siddende på rollatoren

Placer rollatoren på en jævn og solid overflade. Træk derefter bremserne. Rollatoren skal være stabil og må ikke glide. Sid kun oprejst, og læn dig ikke bagud (foto 10).

Siddestilling er kun tilladt som vist mod bevægelsesretningen (foto 11).




Ikke tilladt

Foldning | Transport | Opbevaring

For at folde rollatoren, tryk på foldeknappen (foto 12), træk sædet og rollatoren opad! Vip rollatoren bagud og nedad mod dens retning af bevægelse, og rammen vil derefter foldes (foto 13+14) kan nu transporteres ved at blive trukket eller løftes.

Fjern eventuelt tilbehør før foldning!

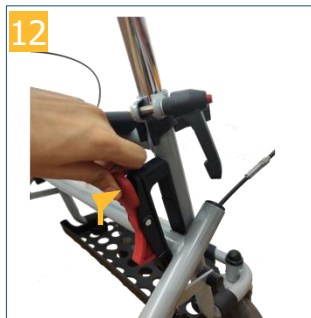

Rengøring | Vedligeholdelse

- Rengør regelmæssigt med fugtig klud!
- Brug ikke hårde rengøringsmidler!
- Brug ikke slibende rengøringsmidler!
- Brug ikke højdosis klor- og eddikebaserede rengøringsmidler!
- For at desinficere kan der bruges et anerkendt spraydesinfektionsmiddel.
- Kontroller skruerne regelmæssigt og spænd dem evt.
- Produktet bør ikke udsættes for temperaturer over 60° C i længere perioder (f.eks. brug i sauna osv.)!

Ved spørgsmål, kontakt forhandler:

SeniorSam A/S
Sundbyvej 19
DK-7752 Snedsted
info@seniorsam.dk
www.seniorsam.dk



Teknisk data

Produkt	Data
Længde	65 cm
Bredde	61 cm
Højde	82-94 cm
Mål imellem håndtag	42 cm
Sædebredde	38 cm
Sædedybde	16 cm
Sædehøjde	59 cm
Vægt med alle dele	9.4 kg
Max. Belastning	136 kg