

Kære kunde.

Tillykke med din nye actium kørestol.
Varenr ac397.

Indledning.

Hermed en dansk brugermanual og beskrivelse af produktet, som skal sikre den rette anvendelse. Læs gerne brugermanualen igennem før ibrugtagningen af kørestolen.

Venligst bemærk at manualen kan afveje en smule fra produktet, da vi løbende opdaterer vores kørestole.

Vær altid opmærksom når kørestolen benyttes, især hvilket underlag der forceres. Underlag på ujævnt eller glat terræn skal brugeren og ledsageren være ekstra varsom.

Simpel figur.



| | | | |
|---|----------------|----|------------|
| 1 | Kørestolsramme | 7 | Fodplade |
| 2 | Håndtag | 8 | Forhjul |
| 3 | Rygstøtte | 9 | Hælstøtte |
| 4 | Sæde | 10 | Håndbremse |
| 5 | Armstøtte | 11 | håndramme |
| 6 | Benstøtte | 12 | Baghjul |

Fold kørestolen ud.

Hold med begge hænder på venstre og højre side af rammen og skub en smule. Skub begge sider af sædepolstringen let ned med begge håndflader, indtil kørestolen og sædet er helt foldet ud. (Figur 3)



(3)




(4)

Bemærk: Når du udfolder kørestolen, må du ikke presse rammen hårdt ned for at den finder sin plads. Beskyt dine hænder så de ikke er under sædet når der presses ned, da de kan komme i klemme i siderammen (Figur 4)

Skal kørestolen foldes sammen. Træk da forsigtigt op i sædet i midten, og kørestolen giver sig nu, og du kan nu trække op med begge hænder placeret på siddebetrækket.

Juster fodpladen op eller ned.

Først løsner du låsemøtrikken med skruenøgle, træk derefter det løse inder rør op eller ned til den ønskede position. Derefter låser og fastgør boltene med skruenøglen i urets retning. (Figur 5)

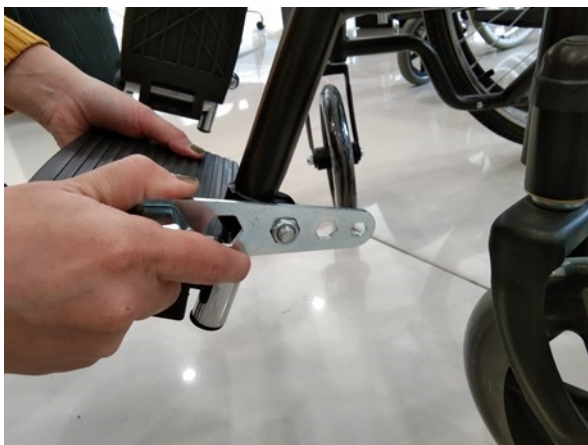

Metode til at køre kørestolen af sig selv. (Figur 6)

Brugeren sidder på kørestolen stabilt, og derefter holder hænderne på baghjulene med begge hænder. Træk nu hjulene fremad på kørestolen med en afbalanceret og rolig kraft med begge hænder, slip hænderne når kørestolen begynder at køre fremad.

Køre baglæns. Det er samme men modsatte øvelse der skal bruges hvis der skal bakkes baglæns. Se ovenfor. (Figur 6)

Brug af bremserne.

Kørestolsbrugeren holder bremsehåndtagene med begge hænder, når kørestolen stopper, derefter flyttes bremsehåndtagene frem til selvslående tilstand, så baghjulene blokeres. Bremsningen er nu afsluttet. (Figur 7)



Hvordan du forcerer forhindringer.

I tilfælde af at komme over eller forbi forhindringer, bør ledsageren holde begge hænder på håndtagene. Derefter trykkes der ned på begge håndtag samtidig med at brugeren læner sig tilbage i ryglænet for at flytte eller løfte kraften fra forhjulene, derefter krydses forhindringer lettere. (Figur 8)

Armlæn.

Armlænet kan løftes op eller ned, til brug under en forflytning af kørestolsbrugeren.

Når armlænet løsnes, skal du først trykke ned på armlænets lukning med den ene hånd for at adskille den fra det forreste beslag i røret, og modsat når det skal ligges ned i låst position igen. (Figur 9)



Aftagelig fodstøtte.

Når du samler fodstøtten, skal du først sigte op på de 2 positionering huller og på de 2 faste stifter, derefter hænger fodstøtten op, og drejer ind mod midten og fodstøtten sidder nu fast, og selvlåser med et klik.

Når du afmonterer fodstøtten, skal du først dreje fodstøtten udenfor i en bestemt vinkel, løfte den op for at komme ud af de faste stifter og til sidst tage fodstøtten af. (Figur 10)

Vedligeholdelse.

Kørestolen skal undersøges og gennemses regelmæssigt for at se, om alle dele og bolte er løse. Hvis der er løsebolte, bør de justeres i tide for at undgå unødvendige problemer.

Smøreolie skal smøres på kørestolens bevægelige dele, hvilket gør kørestolen mere fleksible at betjene.

En blød og tør karklud skal anvendes til at rense vand og andre beskidte stoffer på kørestolens overflade af efter brug, for at undgå at kørestolen rustner.

Sæde- og rygpolstring skal holdes rene og ryddelige for at beskytte brugernes hud.

Kørestolen bruges som et transportredskab i stedet for at gå for gangbesværede patienter, handicappede og ældre personer. Kørestolen er mest egnet til brug på den flade overflade, eller ind eller ud af rummet, hvis men er alene. Hvis det kræver langdistancebrug, skal der være nogen ledsaget sammen med kørestolsbrugeren.

I tilfælde af at komme på tværs med og forcerer forhindringer, bør ledsageren tippe ned i håndtaget med begge hænder, og trykke begge håndtag ned samtidigt, imens kørestolsbrugeren læner sig tilbage i ryglænet kan de forreste hjul tippes op, derfra kan forhindringerne forceres.

Kørestol kan laste 120 kg på flad vej.

Hvis en brugers vægt er mere end 120 kg, frarådes det at benytte denne model. NB. Der er ingen reklamationsret på forkert håndtering eller ibrugtagning.

Brug af kørestolen er kun til privat brug, og der anbefales en maks. hastighed på 3-5 km / t.

Bremserne bruges til at slå op og ned, eller for at stoppe og benytte som parkeringsbremse. Benyt ikke kørestolen alene på en op eller nedtur på en bakke / skråning eller lignede. Benyt ALTID en ledsagerske på en længere tur, hvor der måske skal forceres bakker eller kuperet terræn.

Brugere må ikke stå på fodpladerne i tilfælde af kørestolen vælter.

Imens du bruger kørestolen på en skråning, må du ikke vippe kørestolen og eller dreje den pludseligt, da det kan forcere en væltning.

Dæk.

Dækkene på for og baghjul er PU, og er punkterfri.

Ydeevne

- Belastning: 120 kg
- Mindste drejeradius, gyration: 0,85
- Statisk stabilitet: 10, lodret, 15 vandret
- Diameter baghjul: 610mm
- Bremsers effektivitet: 8

Eftersalgsservice.

Hvis der opstår kvalitetsproblemer i starten af købet, er vores virksomhed ansvarlig for at vende tilbage, ændre og reparere de pågældende dele.

Hvis der opstår kvalitetsproblemer under normal brug af kørestolen, garanterer vores virksomhed 2 års garanti

Hvis der opstår problemer på normale sliddele, såsom for og baghjul, bremsers, tekstilstykker etc, dækkes de ikke af garantien, da der skal påregnes et naturligt slid på disse dele.

Vi vil dog til enhver tid gøre alt hvad vi kan for at hjælpe med en fair behandling.

Følgende tilfælde hører ikke til omfanget af gratis vedligeholdelse:

Dæk, skader og rust på overfladen, fejl, der opstår under upassende brug, manglende vedligeholdelse, fejl der opstår på grund af forkert samling og demontering, eller skader forårsaget af ulykker eller menneskeskabte skader.

Importør

SeniorSam A/S

Sundbyvej 19

7752 Snedsted

Tlf: 92725500

Email : info@seniorsam.dk

Www : www.seniorsam.dk

CVR : 33082037

