



Actiumplus Mobilitet System Manuel kørestole serien – 10, 20, 30 og 40

Brugsanvisning



kørestole serien 10



kørestole serien 20



kørestole serien 30



kørestole serien 40



- 1. Generelle oplysninger**
- 2. Sikkerhedsforskrifter og vejledninger**
- 3. Produkt generel beskrivelse**
- 4. Brug**
- 5. Rensning**
- 6. Vedligeholdelse og Service**
- 7. Garanti**
- 8. Tekniske oplysninger**
- 9. Montering og brug**
 - 9.1.1 Serien 10**
 - 9.1.2 Serien 20**
 - 9.1.3 Serien 30**
 - 9.1.4 Serien 40**
 - 9.2 Hjul**
 - 9.3 Bremseser**
 - 9.4 Benstøtter**
 - 9.5 Armlæn**
- 10 Tilbehør**
 - 10.1 Hovedstøtte**
 - 10.2 Højdejusterbare skubbehåndtag**
 - 10.3 Tilbagelænet ryglæn**
 - 10.4 Stabilitet krydsbom**
 - 10.5 Justerbar spændkraft af ryglæn**
 - 10.6 Side kropstøtte**
 - 10.7 Tipsikringer**

1. Generelle oplysninger

Tilsigtet brug af enheden og indikationer for brug

Den manuelle kørestol er en medicinsk enhed beregnet til personer med begrænsede bevægelsesevner, som ikke er i stand til at stå, gå og/eller sidde selvstændigt. Det er dedikeret til transport og flytning af sådanne personer i siddende stilling. Brugere kan bevæge sig med kørestolen selvstændigt eller med hjælp af en ledsagerbetjent. Stolen kan bruges både indendørs og udendørs på forskellige overflader (asfalt, beton, sten, grus) i gode vejrforhold. Enhver anden anvendelse er forbudt.

Sikkerhed og kvalitetsstandarder

Kørestolen har bestået alle nødvendige test og det er i en overensstemmelse med følgende europæiske standarder: PN-EN 12182; PN-EN 12183; PN-ISO 7176-1,3,5,7,8,15,19; PN-EN 1021-1.


Det opfylder også alle CE krav implementeret af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr. Ved en korrekt brug af kørestolen vi forudser dens fejlfri arbejde for mange år.

Er der spørgsmål kontakt venligst jeres forhandler eller producenten direkte. Kontaktoplysningerne findes på sidste side af brugsanvisningen.

2. Sikkerhedsforskrifter og vejledninger

- Brugsanvisningen må læses af alle personer der vil bruge enheden.
- Producenten tager ikke ansvar for skade og uheld forårsaget af, at brugsanvisningen ikke blev fulgt.
- Brug produktet kun i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages fejl, skal du straks kontakte forhandleren.
- Følg vejledninger og advarsler på alle produktmærker.
- Brug produktet kun efter hensigten beskrevet af producenten.
- Man må på ingen måde ændre produktet, medmindre har producenten godkendt det skriftligt.
- Produktet er beregnet til indendørs brug på flade og lige overflader.
- Alle hjul bør altid stå fast på overfladen. Det tillader at beholde rigtig stabilitet og forebygger uheld
- Maksimum belastning kan ikke overstige 140 kg for sæde bredde indtil 50 cm (1 for 1 tværstiver) og 180kg for sæde bredde mellem 53 og 57 cm (2 for 1 tværstiver).
- Undgå hud forbrændinger under brug i direkte sollys. Noget at stolens dele kan blive varm.
- Det anbefales ikke at bruge kørestolen på sand, mudder eller i ekstreme vejrforhold.
- Ledsagerbetjenten af kørestolens bruger bør være en sund og dygtig person.
- Fjern ikke noget dele eller tilbehør af kørestolen dig selv. Det kan påvirke produktets stabilitet og stivhed.
- Anbring ikke kørestolen i nærheden af varmekilder eller ild (pejse, ovne, varmeapparater) Det anbefales ikke at ryge cigaretter når man sidder på kørestolen. Kørestolen er ikke brandsikker.

Følg nedenstående advarsler:

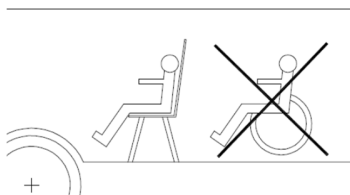

Kørestolen er ikke designet som en sæde for en bruger af transportmidler (fx. busser, tog, metro, fly o.a.) Det er forbudt at sidde i kørestolen i en bevægende transportmiddel. Kørestolen bør pakkes og fastgøres under transport. Kørestolens bruger skal forflyttes fra kørestolen til sæde i køretøjet. Der opstår risiko for alvorlig skade eller uheld hvis man ikke følger ovenstående advarsler.



Kørestolens konstruktion på grund af dens formål indeholder mange bevægende elementer, huller og revner mellem enhedens dele. Der opstår risiko for at klemme kropsdele under montering, afmontering eller justering af kørestolen. Særligt må man lægge mærke til fingrene og hænderne. Der opstår risiko for at have ens finger skåret under justering af enhedens dele. Altid vær forsigtig når du monterer eller justerer kørestolen for at ikke at klemme og kvæste dine kropsdele.

3. Produkt generel beskrivelse

Actiumpus kørestol har alle typiske funktioner, som den type enheder har, såsom: parkeringsbremser, aftagelige og højdejusterende benstøtter, aftagelige og højdejusterende armlæn og har bag hovedhjul, drejeforhjul, enkelt eller dobbelt kryds. Kørestolen er lavet af pulverlakeret stål eller aluminium rør. Det er varmt ved berøring og rustbeskyttet. For justering skal man anvende noget værktøj, der kan købes i hver byggemarked.

Kørestolen er let at transportere og afmontere på grund af dens krydsramme, let at manøvrere, let at forflytte brugeren til og fra kørestolen og dens struktur er holdbar og solid.



Kørestol er leveret i kartoner, opdelt og afmonteret i separate dele for lettere transport.

Hver pakke indeholder:

- 1 hoved krydsramme med polstring, 2 bremser, 2 armlæn, 2 baghjul og 2 drejeforhjul;
- 2 aftagelige benstøtter med fodplader;
- 1 brugsanvisning

Yderligere tilbehør afhænger af ordrespecifikationen.

Det er eksempel på en produktmærke (ikke original). Produktmærke er placeret i bunden af rammen.

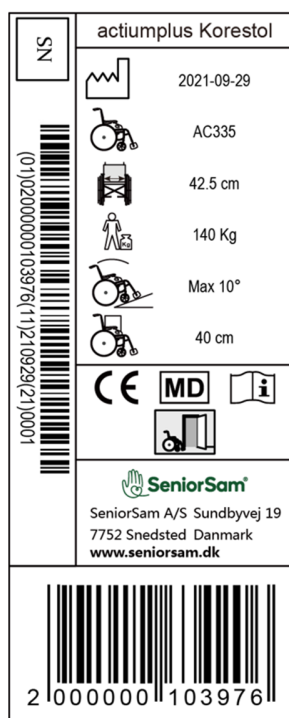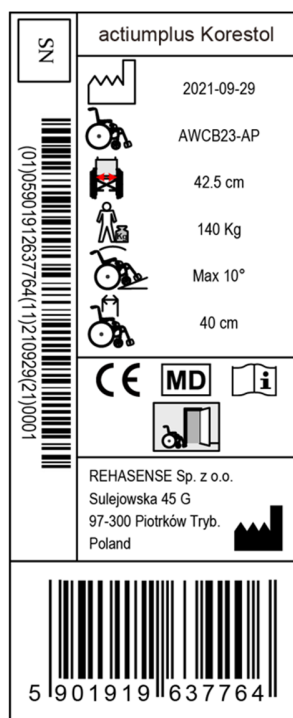

Produktions dato



Medicinsk udstyr



Fremstillet




Bliv fortrolig med UM



Kan ikke bruges udendørs

Hovedelementer:

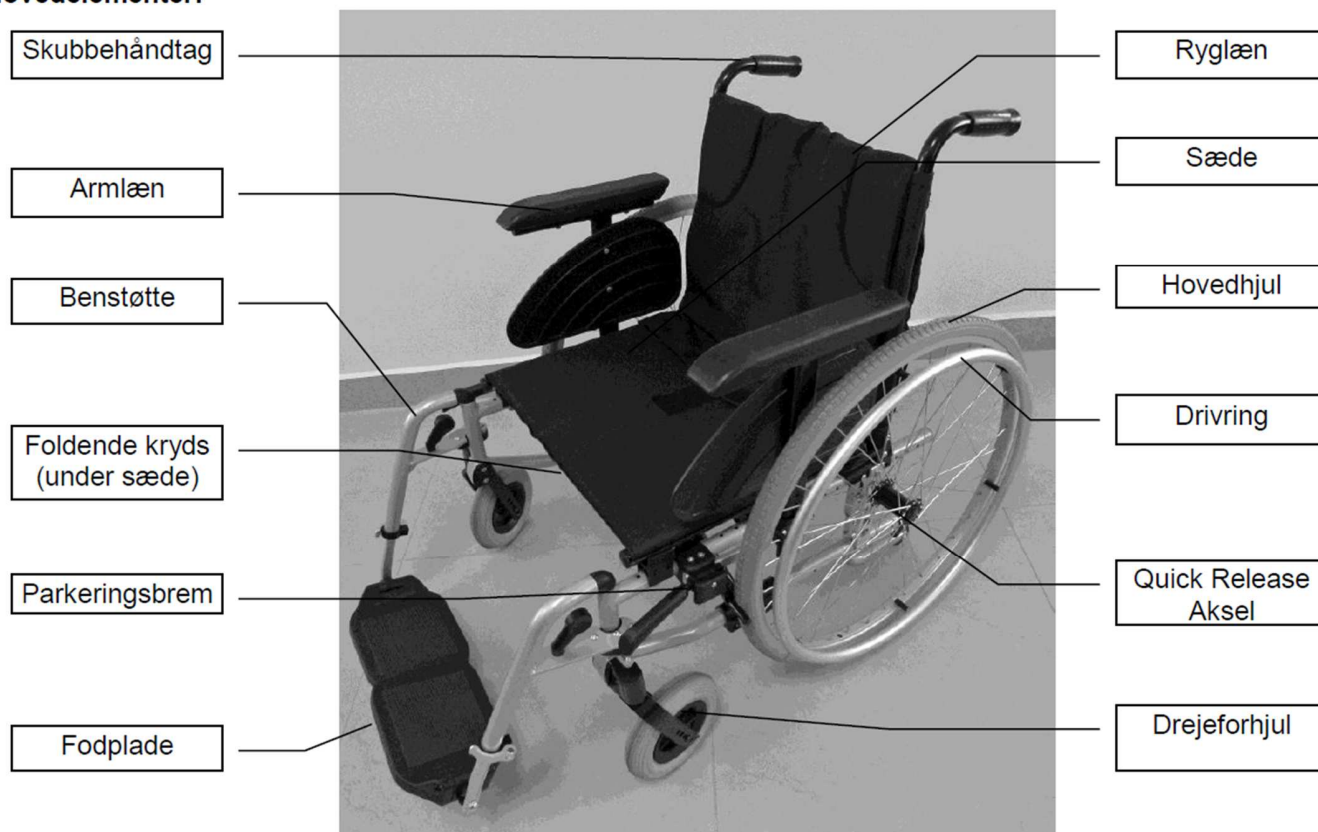

Ovenstående billede viser en eksempelvis kørestol med almindelige komponenter og deres placering. Nøjagtig udseende af din kørestol og dens elementer kan afvige fra den ovenstående (afhængig af ordrespecifikation), men deres navn, funktioner og placering forbliver det samme.

Valgfri udstyr


Afhængig af version og ordrespecifikationen, kan kørestolen være udstyret med forskellige typer hjul, tromlebremser, enkelt eller dobbelt kryds, højdejusterende fodplader, benamputerede støtter, hemiplegisk armlæn, væltstøttehjul, hovedstøtte, sidestøtter, sikkerhedsbælte, sædepude, ryglæn polstring med spænding justering, tilbagelænet ryglæn, højdejusterbar skubbehåndtag, stabilitet krydsbom, bord, paraply, infusion holder, krykke holder.

Kørestolens montering:

Vi anbefaler kørestolen er monteret og færdiggjort af en professionel montør inden den leveres til final bruger.


- Først og fremmest må man tage alle stolens komponenter ud fra kartoner og tjekke om alle komponenter er til stede efter ordrespecifikationen. Hvis man opdager på dette tidspunkt, at der mangler noget eller er beskadiget, må man stoppe montering med det samme. Kontakt din forhandler med det samme.
- Aftagelige komponenter som hjul, fodplader og yderligere udstyr må monteres og justeres efter brugsanvisningens vejledninger angivet i de respektive kapitler vedrørende særlige dele.

Hvordan man folder og udfolder kørestolen

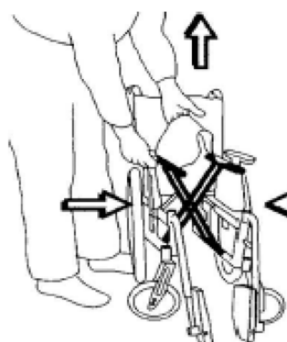

For at folde: Tage puden fra. Hæv fodpladerne op. Hæv polstring op (lige som vist på billedet).


For at udfolde: Placer begge hænder sæde polstring rør og tryk ned (kig på billedet). Man må være forsigtig og ikke placere hænder mellem rør og kørestolens ramme under udfoldelse.

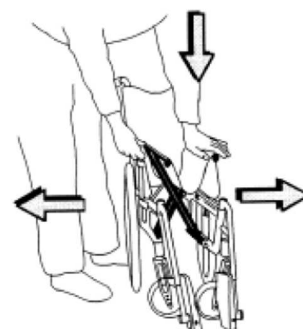

4. Usage

Hvordan man løfter kørestolen

Løft kørestolen op ved brug af skubbehåndtag og øverste forhjørner af kørestolens ramme, hvor benstøtter er placeret.

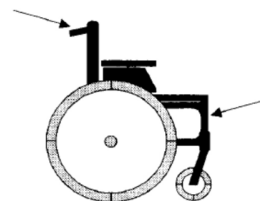

ADVARSEL! Det er forbudt at løfte kørestolen op ved brug af fodpladerne eller armlæn. Vi anbefaler at afmontere fodpladerne inden man løfter kørestolen.

Måder at forflytte sig til og fra kørestolen

Undervisning af måder af overføre brugeren må gennemføres af en kvalificeret personale. Nedenfor vises kun vores Anbefalinger.

Overføring af brugeren fra kørestolen til seng

Brugeren bør vende sig mod sengen uanset om en ledsagerbetjent er til stede eller ej. Kør kørestolen så tæt på sengen som muligt og sørg for at forhjulene er vendt fremad. Træk bremsen, hæv armlæn/side paneler op på denne side af kørestolen, hvor overførsel til seng vil ske.



Overføring af brugeren fra seng til kørestolen

Brugeren bør vende sig mod sengen uanset om en ledsagerbetjent er til stede eller ej. Kør kørestolen så tæt på sengen som muligt og sørg for at forhjulene er vendt fremad. Træk bremsen, hæv fodpladerne op. Forsøg ikke at komme på fodpladerne, da kørestolen kan vælte. Ledsagerbetjenten bør hovedsageligt bruge benmuskler for at trække kørestolen op på trappe og undgå på samme tidspunkt at bøje sig overdreven og risikere at skade rygmuskler.




Kørsel af kørestolen

Det rigtige vægtdistribution er en grundlæggende element af korrekt brug af kørestolen. Det rigtige brug af kørestolen afhænger af vægt, kropsforfatning, stilling af personen der sidder på kørestolen og placering af baghjulene. Jo større vægt af brugeren ligger på baghjulene, jo lettere er kørestolen at køre. Jo større vægt af brugeren ligger på forhjulene, jo sværere er kørestolen at køre.

ADVARSEL! Altid tjek om bremsen er trukket, når du forlader brugeren af kørestolen siddende i den.

ADVARSEL! Altid tjek om forhjulene er vendt fremad, når kørestolen ikke kører, for at forstærke deres kontakt med overfladen.

Hvordan man kører over en kantsten

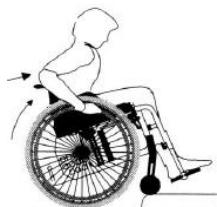

Bruger vendt mod kantstenen

(Vi anbefaler, at nedestående teknik bliver brugt kun af erfarede brugere.)

Kør kørestolen så tæt på kantstenen så muligt.

Tilt kørestolen bagover og balancer på baghjulene. Løft forhjulene til kantstens højde. Skub baghjulene fremad og på samme tidspunkt læn fremad for at overføre din vægt til forside af kørestolen.



Ledsagerbetjent og bruger vendt mod kantsten

Ledsageren bør tilte kørestolen bagover ved brug af bom for tiltning for at forhjulene kommer på fortovet.

Brug håndtagene bag på kørestolen for at køre baghjulene op på fortovet.



Bruger vendt baglæns mod hindring

(Nedenstående måde vil fungere kun med meget lave hindringer og når fodplader ikke skaber en hindring selv)

Kør baglæns mod hindring indtil baghjulene rører på hindringen. Kør så baglæns og læn fremad på samme tidspunkt.

Hvordan kører man nedad hindringen?

Bruger vendt mod hindringens kant

(Vi anbefaler, at nedestående teknik bliver brugt kun af erfarede brugere.)

Kør kørestolen så tæt på kantstenens kant som muligt.

Balancer kørestolen på baghjulene sådan at forhjulene rager frem så meget som muligt og nødvendigt.

Kør ned af kantstenen langsomt og sæt forhjulene på grunden omhyggeligt.



Ledsagerbetjent og bruger vendt mod hindringens kant

Tilt kørestolen baglæns ved brug af bom for tiltning sådan at forhjulene kører fra kantstenen så meget som muligt og nødvendigt.

Kør ned af kantstenen langsomt og sæt forhjulene på grunden omhyggeligt.




Bruger vendt baglæns mod hindringen

(Vi anbefaler ikke at anvende dette måde på kantsten højere end 10 cm)

Kør kørestolen så tæt på kantstenens kant som muligt.

Læn frem og kør ned af kantstenen langsomt.

ADVARSEL! Dette måde kan være farligt da kørestolen kan vælte.

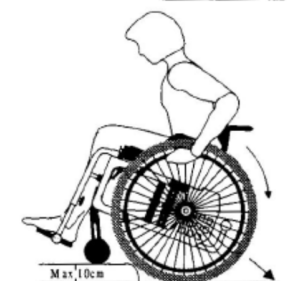

Ledsagerbetjent og bruger vendt baglæns mod hindringens kant

Kør kørestolen baglæns til fortovets kant så tæt som muligt

Kør langsomt ned fra fortovet og træk kørestolen ud fra fortovet indtil forhjulene befinder sig udenfor fortovet og så sæt dem ned på grunden.



Forcering en bakke

Følg venligst nedenstående vejledninger når man forcerer en bakke:

- Undgå at skifte retningen af kørsel når du kører ned ad bakken.
- Forsøg at køre i en lige linje på bakken. Slå ikke sidelæns.
- Bed om hjælp hvis nødvendigt for at undgå unødvendig risiko.
- Når du kører op ad bakken, læn frem for at overføre din vægt til forsiden og gøre kørestolen mere stabil.
- Når du kører ned ad bakken, læn tilbage for at overføre din vægt til bagsiden og gøre kørestolen mere stabil.
- Hav kontrol over hastigheden ved brug af baghjulenes drivringene og træk ikke bremserne.

For at gå op og ned ad trappe

ADVARSEL! Altid bed andre om hjælp. Kørestolen må transporteres af mindst 2 sunde og stærke personer.

ADVARSEL! Kør ikke kørestolen på rulletrapper hverken dig selv eller ved hjælp af andre.



Op ad trappen:

Skub kørestolen mod trappen indtil den rører på første trin med baghjulene. Tilt kørestolen baglæns ved brug af skubbehåndtag. Den anden person skal tage fat i nedre hjørner af rammen.

ADVARSEL! Kørestolen må aldrig løftes ved brug af fodpladerne.

Transporter kørestolen langsomt op ad trappen trin for trin. Når du er oppe på trappen, træk kørestolen indtil foghjulene befinder sig på grunden og sæt dem ned.


Ledsagerbetjener bør anvende benmuskler for at trække kørestolen op ad trappen for at undgå på samme tidspunkt at bøje sig overdreven og risikere at skade rygmuskler.

Ned ad trappen:

Det at transportere kørestolen ned ad trappen må ske på samme måde som beskrevet ovenfor.

ADVARSEL! Producenten anbefaler, at brugeren bliver først trænet af en erfaret terapeut.

Transport vejledning

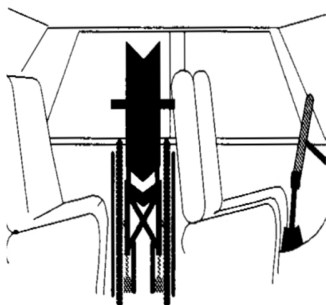

Actiumplus kørestolen er let at transportere. Det kan foldes og afmonteres for at reducere størrelse og vægt af dens enkelte dele. Det er muligt at aftage baghjulene, fodpladerne og folde kørestolen krydsrammen ret let som beskrevet før.

ADVARSEL! Kørestolen er ikke en bilsæde. Under bilkørsel må man ikke sidde på kørestolen. Kørestolen bør foldes og fastsættes.

5. Rensning

Rammen

Rammen bør renses ved brug af en fugtig klud eller ved brug af en blødt rengøringsmiddel. Senere bør den aftørres med en tør klud. Rammen bør regelmæssigt kontrolleres for at finde skader på lak, der kan forårsage korrosion. I tilfælde når der opdages synlige skader på rammen (revner, lakering defekter o.a.), kontakt din forhandler for servicering.

Polstring

Sædet og ryglænet er lavet af et meget holdbar forstærket nylon. Sædets polstring kan let fjernes af ved at fjerne skruerne placeret i rammerør. Ryglænets polstring kan let fjernes af ved at fjerne skruerne placeret i ryglænets rør. Sædets og ryglænets polstring kan renses ved brug af en svamp og sæbe.

Almindelig snavs på metal og plast dele kan fjernes med almindelige rengøringsmidler og en svamp eller blødt klud. Tjek specifikationen på rengøringsmidlet og anvend kun de midler, der er beregnet til rensning og desinfektion (ingen opløsningsmidler eller slidemidler).

6. Vedligeholdelse og Service

På trods af solid konstruktion og anvendelse af holdbare materialer er produktet desværre udsat for slid. Derfor anbefales det at have kørestolen kontrolleret regelmæssigt af en professionel servicemand.

For at gennemføre almindelige service ydelser er det nok at have et sæt af topnøgler eller et skiftenøgle, en skruetrækker med lige og kryds kær. v.

Delene der bør regelmæssigt kontrolleres:

<u>Navn af del</u>	<u>Kontrol måde</u>	<u>Frekvens</u>
Dæk	Lufttryk (2,0-2,2 bar), stand af slidbanen og dæk. Man må holde det rigtige og lige lufttryk i begge dæk. Hårdere dæk giver bedre manøvreegenskaber og øger lethed af kørsel af kørestolen, men formindsker komforten på ulige overflader.	Mindst 1 gang per uge
Eger	Løse eger kan forårsage deformation af baghjulene. Kontakt din forhandler eller en lokal cykelforhandler for at reparere løse eger.	Hvis problemet opstår
Hjulaksler	Fjern hår eller akkumuleret snavs.	Hvis nødvendigt
Drivringe	Ridsede drivringe bør udskiftes fordi de kan skade brugerens hænder under kørsel.	Hvis nødvendigt
Bremser	Bremsestærket kommer an på dæktryk. Virkningsgrad af bremses kan påvirkes af snavs akkumuleret på dæk. Hold bremsene rene ved brug af en fugtig klud for at fjerne snavs og så smør skruetrægten for håndtaget.	Tjek om bremsene fungerer mindst en gang om ugen
Ramme	Hold kørestolen ren for bedre komfort af bruger.	Mindst en gang om måned, afhængigt af brug forhold
Drejforhjul	Stedet mellem gaflen og forhjulet bør holdes rent, da snavs kan akkumuleres der og øge slid af hjullejer. For at gøre det bør man afmontere forhjulet fra gaflen, fjerne snavsen og smøre metal hjulelementer (fx. teknisk smør).	Vedligeholdelse bør gennemføres mindst en gang om måneden afhængigt af almindelige overflader man bruger kørestolen på og forhold
Aftagelige elementer	Tjek tilstanden af aftagelige elementer af kørestolen. Hvis skruer er løse, bør de strammes.	I tilfælde af intens brug bør man gennemføre inspektion en gang om måneden.

Hyppigste problemer og løsninger

Hvis du bemærker noget fejl i kørestolen drift, hold med at bruge den med det samme - kontakt din forhandler eller forhandlers serviceringsssted. Producenten garanterer ikke kørestolens god drift hvis de anvendte dele ikke er originale.

<i>Symptomer</i>	<i>Muligt årsag</i>	<i>Hvad skal jeg gøre?</i>
Kørestolen tilter til en side	• Et af bagdækkene kan have højere tryk end den andet.	• Pump dækkene op (2,0-2,2 bar). • Tjek om kørestolens vægt ikke er forskubbet
Kørestolen er svært at skubbe	• Lavt dæktryk. • Forhjulakslerne er snavsede. • For stort vægt ligger på driveforhjulene.	• Pump dækkene op (2,0-2,2 bar). • Fjern snavset eller knudret hår fra aksler af driveforhjulene. • Flyt tyngdepunktet.
Kørestolen er svært at dreje	• Lavt dæktryk. • Horisontal aksler af forhjulene er skruet for hårdt. • Forhjulakslerne er snavsede.	• Pump dækkene op (2,0-2,2 bar). • Tjek aksler af forhjulene og løsn dem hvis nødvendigt. • Fjern snavset eller knudret hår fra aksler af driveforhjulene.
Bremser fungerer ikke korrekt	• Lavt dæktryk.	• Pump dækkene op (2,0-2,2 bar).
Det er svært at folde og udfolde kørestolen	• Polstringen er sæt på for tæt • Krydsrammens hængsel er snavset.	• Løsn skruerne der holder polstringen og så skrue dem igen. • Rens og smør krydsrammens hængsel.
Kørestolen er ikke stabil	• Lavt dæktryk. • Kørestolens elementer er ikke stive og stabile.	• Pump dækkene op (2,0-2,2 bar). • Tjek om alle skruer og møtrikker er skruet tæt.
Flade dæk	• Dæk eller slange er punkteret. • Dæk og slange er slidte.	• Kontakt din forhandler eller en cykel serviceringsssted for at reparere eller udskifte de defekte slange og dæk.

I tilfælde af fejl på produktet, anbefaler vi at kontakte en autoriseret servicestation. Producenten garanterer ikke, at kørestolen vil fungere korrekt hvis den bliver repareret af en uautoriseret servicestation eller uden de originale reservedele.

ADVARSEL! Uautoriserede reparationer dækkes ikke af garantien.

Autoriserede servicering

Kontakt din forhandler eller direkte producenten for autoriseret servicering.

Proceduren for at sende kørestolen eller dens dele til servicering

For at gennemføre reparation på kørestolen bør man kontakte producenten direkte eller en lokal forhandler. Kørestolen eller dens dele bør sendes i en pakke, der vil beskytte dem fra transport skade. Den bedste løsning er at beholde den originale karton. Levering bør ske via et leveringsfirma angivet af producenten.

ADVARSEL! Producenten tager ikke ansvar for skade, der er sket til kørestolen eller dens dele på grund af forkert pakning.

Opbevaring

Opbevar kørestolen i et tørt sted, hvor det ikke fryser. Kørestolen kan foldes for at reducere dens størrelse og spare på rum. Man kan også aftage fodpladerne for at spare endnu mere rum. Frost eller fugtighed kan forårsage skade på dækkene, polstring, aksler, lejer og andre elementer. For at beskytte dæk mod skade fra langvarig opbevaring kan man sætte træblokker under rammen. Det anbefales også at betække kørestolen for at beskytte den fra støv og snavs.

Bortskaffelse & genbrug af produktet

Produktet kan ikke bortskaffes med almindeligt husholdning affald. Den skal leveres til en lokal genbrugsstation.

7. Garanti

Garanti information

- Producentens garanti for kørestolen er gyldig for 24 måneder fra indkøbsdato.
- I denne periode alle skader på materialer eller dele, der opstår på grund af produktionsfejl eller anvendelse af forkerte materialer vil repareres eller udskiftes gratis.
- Skader på dæk, polstring eller gafler forårsaget af slid under brug dækkes ikke af garantien. Andre dele af kørestolen, som slides under almindelig brug heller ikke dækkes af garantien.
- Alle mekaniske fejl og skader forårsaget af forkert brug eller u hensigtsmæssig brug dækkes ikke af garantien.
- Uautoriserede ændringer og modifikationer af kørestolen vil føre til tab af garantiretten.
- Hvis der opdages fejl eller skader, bør man informere leverandøren med det samme.

Ansvar rækkevidde

- Garantien dækker ikke transportomkostninger.
- Garantien dækker ikke kvæstelse eller andre skader forbundet med funktionsfejl af dette produkt.
- Garantien dækker ikke tab, der resulterer fra umulighed at bruge produktet efter alle fejl blev fjernet.
- Producenten tager ikke ansvar for skader forårsaget af forkert forståelse af denne brugsanvisning.

Kørestolens modifikationer og ekstra monterede elementer

- Denne definition beskriver hver kørestol, der blev modificeret og adskiller sig fra detaljerne angivne i denne brugsanvisning eller hvis ekstraelementer blev fastgjort på produktet. Hvis produktet blev modificeret på det ovenstående måde af brugeren uden en skriftlig godkendelse fra producenten, det ikke mere overholder CE væsentlige krav og ikke dækkes af garantien.
- Hvis du har spørgsmål eller tvivl vedrørende modifikationer, kontakt venligst producenten inden du foretager sig noget.

8. Tekniske oplysninger

	serien 10		serien 20		serien 30		serien 40	
Kryds rammen	1 x 1	2 x 1	1 x 1	2 x 1	1 x 1	2 x 1	1 x 1	2 x 1
Sæde bredder (cm)	25, 30, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5, 50	53, 57, 61	37.5, 40, 42.5, 45, 47.5, 50	53, 57	25, 30, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5, 50	53, 57, 61	25, 30, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.5, 50	53, 57, 61
Sæde dybde (cm)	30, 40, 45, 50	45, 50	40	40	30, 35, 40, 45	45, 50	30-42.5 40-52.5	47.5-60
Max bruger vægt (kg)	140kg	180kg	140kg	180kg	140kg	180kg	140kg	180kg
Stolens længde (cm) fx. D40cm	105	105	105	105	105	105	105	105
Stolens bredde (cm) fx. W45cm	66	66	66	66	66	66	66	66
Foldet længde - ingen fodplader (cm) fx.. D40 cm	76	76	76	76	76	76	76	76
Foldet højde (cm)	91	91	91	91	91	91	92.5	92.5
Foldet bredde (cm)	33	33	34	34	34	34	34	34
Totalvægt (kg) fx. W45 D40	16.6	16.8	14.15	14.35	14.6	14.8	16.6	16.8
Tungeste element (kg)	7.4	7.4	6.95	6.95	6.95	6.95	7.85	7.85
Transport vægt (kg)	7.4	7.4	6.95	6.95	6.95	6.95	7.85	7.85
Forsæde højde (cm)	49	49	49	49	49	49	49	49
Ryglæn højde (cm)	42	42	42	42	42	42	42	42
Fodplade længde (mellem) (cm)	35-45	35-45	35-45	35-45	34-48	34-48	34-48	34-48
Benstøtte vinkel (°)	70°	71°	72°	73°	74°	75°	76°	77°

Armlæn højde (mellem) (cm)	23-28	23-28	23-28	23-28	23-28	23-28	23-28	23-28
Hovedhjul diameter (tommer)	24"	24"	24"	24"	24"	24"	24"	24"
Forhjul diameter (tommer)	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"

9. Kørestolens montering og brug.

9.1.1. Serien 10


Serien 10 er den enkleste i actiumplus familie. Den har et begrænset sæt af stillinger for bagakslen af selvkørende store hjul og 3 muligheder for den Ledsagerbetjent Omsorg mindre hjul. Lejehuse har en fastsat vinkel og ikke er justerbare, der begrænser mulighederne for stilling af sæde under forskellige vinkler.

Ramme indstillinger - serien 10

Rammedesign giver mulighed for justering af sædevinklen og højde over jorden. Justeringen kan foretages ved at ændre placeringen af for- og baghjul.

- For at ændre sædevinklen, skal man ændre stillingen af baghjulene og vinklen af lejehuse gafler.
- For at ændre sædehøjden, skal man ændre stillingen af baghjulene og forhjulene og tjekke vinklen på lejehuse gafler

Justering af baghjul

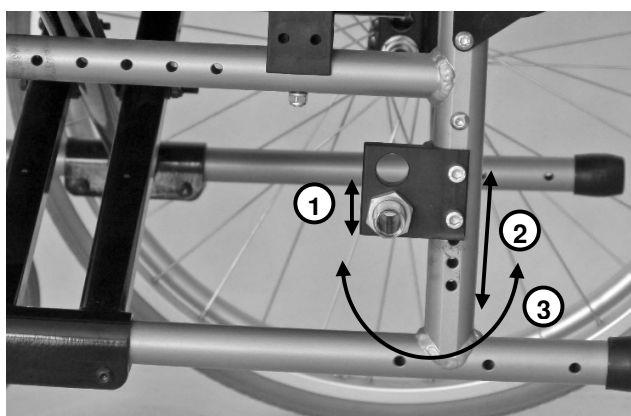

- For at ændre positionen af baghjulene, skal man afkoble og løsøre hjul bøsningen (1) fra hullet i den sorte beslagsplade og sætte den i bøsningen ind i den anden hul i pladen. Man skal holde den rigtige rækkefølge af skiver og møtrikker.
- Hvis flere justeringer er nødvendige, skal man skrue af 2 bolte (2), der fastgør den sorte beslagsplade til rammerøret, flytte den op eller ned til den ønskende position og så sætte ind og skrue de 2 bolte i den nye position.
- Hvis man har brug for bedre stabilitet bagved (fx. efter benamputationer), den sorte beslagsplade kan roteres 180° (3) for at flytte tyngdepunktet baglæns.

Justering af forhjul



Forgaflerne har en enkel akselposition og ingen vinkeljustering mulighed. Man kan sætte sædet på forskellige højder ved at anvende forskellige diameter forhjul og baghjul og baghjulaksel position. Se venligst "Hjul oversigt" for flere oplysninger.

9.1.2. Serien 20


Serien 20 er den enkleste aluminium kørestol i actiumplus familie. Den har mangfoldige bagaksel indstillinger for Selvkørende og Ledsagerbetjent-kørende set ups med hjul af forskellige størrelser. Lejehuse har en fastsat vinkel og ikke er justerbare, der begrænser mulighederne for stilling af sæde under forskellige vinkler.

Ramme indstillinger - serien 20

Rammedesign giver mulighed for justering af sædevinklen og højde over jorden. Justeringen kan foretages ved at ændre placeringen af for- og baghjul.

- For at ændre sædevinklen, skal man ændre stillingen af baghjulene og vinklen af fordrejekakslers gafler.
- For at ændre sædehøjden, skal man ændre stillingen af baghjulene og forhjulene og tjekke vinklen på lejehuse gafler

Justering af baghjul

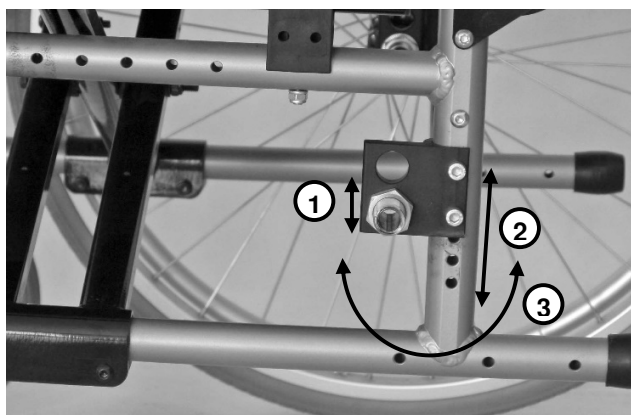

- For at ændre positionen af baghjulene, skal man afkoble og løsgøre hjul bøsningen (1) fra hullet i den sorte beslagsplade og sætte den i bøsningen ind i den anden hul i pladen. Man skal holde den rigtige rækkefølge af skiver og møtrikker.
- Hvis flere justeringer er nødvendige, skal man skrue af 2 bolte (2), der fastgør den sorte beslagsplade til rammerøret, flytte den op eller ned til den ønskende position og så sætte ind og skrue de 2 bolte i den nye position.
- Hvis man har brug for bedre stabilitet bagved (fx. efter benamputationer), den sorte beslagsplade kan roteres 180° (3) for at flytte tyngdepunktet baglæns.

Justering af forhjul



Forgaflerne har en enkel akselposition og ingen vinkeljustering mulighed. Man kan sætte sædet på forskellige højder ved at anvende forskellige diameter forhjul og baghjul og baghjulaksels position. Se venligst "Hjul oversigt" for flere oplysninger.

9.1.3. Serien 30

Serien 30 har mest justeringsmuligheder blandt fastrammede kørestole i actiumplus familie.


Den har mangfoldige bagaksel indstillinger for Selvkørende og Ledsagerbetjent-kørende set ups med hjul af forskellige størrelser. Lejehuse er justerbar, som giver mulighed for mange sædehøjde og vinkler for at tilfredsstille alle kørestoler brugere.

Ramme indstillinger – serien 30

Rammedesign giver mulighed for justering af sædevinklen og højde over jorden. Justeringen kan foretages ved at ændre placeringen af for- og baghjul.

- For at ændre sædevinklen, skal man ændre stillingen af baghjulene og vinklen af fordrejekakslers gafler.
- For at ændre sædehøjden, skal man ændre stillingen af baghjulene og forhjulene og tjekke vinklen på lejehuse gafler.

Justering af baghjul

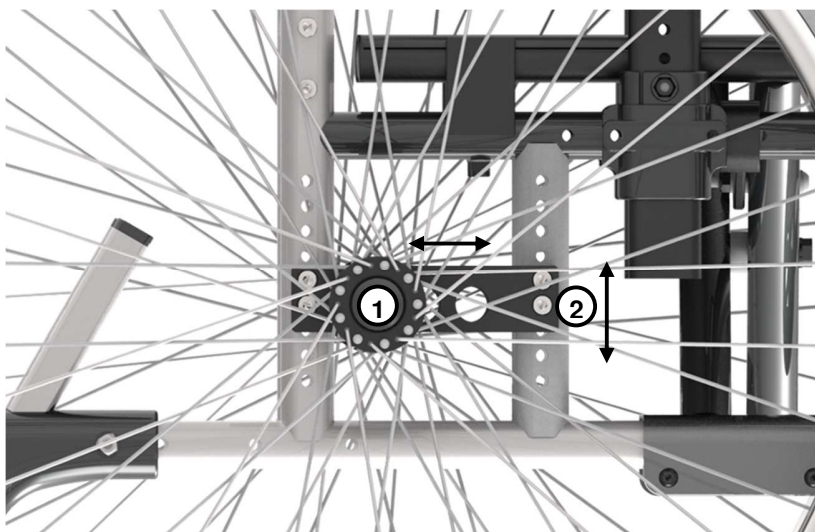

- For at ændre positionen af baghjulene, skal man afkoble og løsøre hjul bøsningen (1) fra hullet i den sorte beslagsplade og sætte den i bøsningen ind i den anden hul i pladen. Man skal holde den rigtige rækkefølge af skiver og møtrikker.
- Hvis flere justeringer er nødvendige, skal man skrue af de 4 bolte (2), der fastgør den sorte beslagsplade til rammerøret, flytte den op eller ned til den ønskende position og så sætte ind og skrue de 4 bolte i den nye position
- Hvis man har brug for bedre stabilitet bagved (fx. efter benamputationer), den baghjulet monteres i position (3) for at flytte tyngdepunktet baglæns.



Justering af lejehus



Hvis positionen af baghjul eller forhjul bliver ændret, skal man også justere vinklen af drejeakslen for at undgå hjul vibration og sikre en jævn, lige kørsel.

Drejeakslen hovedet (1) må altid sættes på 90°. Efter man har skiftet hjul set-up, justering af vinklen er nødvendigt.

For at justere vinklen af forgaflen:

- Løsgør 2 bolte (2) vist på billedet,
- Roter forgaflen bagtil eller fremad indtil akslens hoved (1) er på 90°.
- Stram boltene igen.



For at ændre sædets forvinkel over jorden kan man montere forhjulene i 6 forskellige positioner (3). De tre huller giver mulighed også for montere forhjulene af forskellige diameter.

ADVARSEL! Alle ovennævnte justeringer kan foretages af en kvalificeret servicebetjent eller fysioterapeut.

9.1.4. Serien 40

Serien 40 har rammen, der giver mulighed for justere sædedybden og have mangfoldige set-ups af hjul, aksler, tværstiver og drejeaksler.

Der er det mest fleksibel design i den hele actiumplus familie. Den kan bruges af aktive selvkørende brugere og anvendes til genindsættelse, hvor man har brug for stor kontrol, støtte og stabilitet.


Ramme indstillinger – serien 40

Rammen giver mulighed for mangfoldige justeringer af sædevinklen, højden og dybden samt forskellige grader af stabilitet ved at justere kørestolen tyngdepunktet (TP) i forhold til baghjulaksler. Det at flytte TP tættere på akslen gør kørestolen mere ustabil og "ivrig" for en aktiv bruger. Det at flytte TP fjerner fra akslen gør kørestolen mere stabil og svært at vælte og på den måde perfekt for en bruger, der ønsker stabilitet og sikkerhed.

Justeringen kan gennemføres ved at skifte positionen af for- og baghjul i forhold til brugerens tyngdepunktet. Når man justerer sædedybden for at tilfredsstille højere og mindre brugere, kan man anvende forskellige indstillinger af sæderør og polstring.

Sædevinkel, højde og position

- For at ændre sædevinklen, skal man modificere beslaget af baghjul og lejhuse gafler.
- For at ændre sædehøjden, skal man ændre stillingen af baghjulene og forhjulene og tjekke vinklen på lejhuse gafler
- For at ændre sædepositionen, flere justeringer er nødvendige og de må gennemføres af en autoriseret servicebetjent udpeget af producenten.

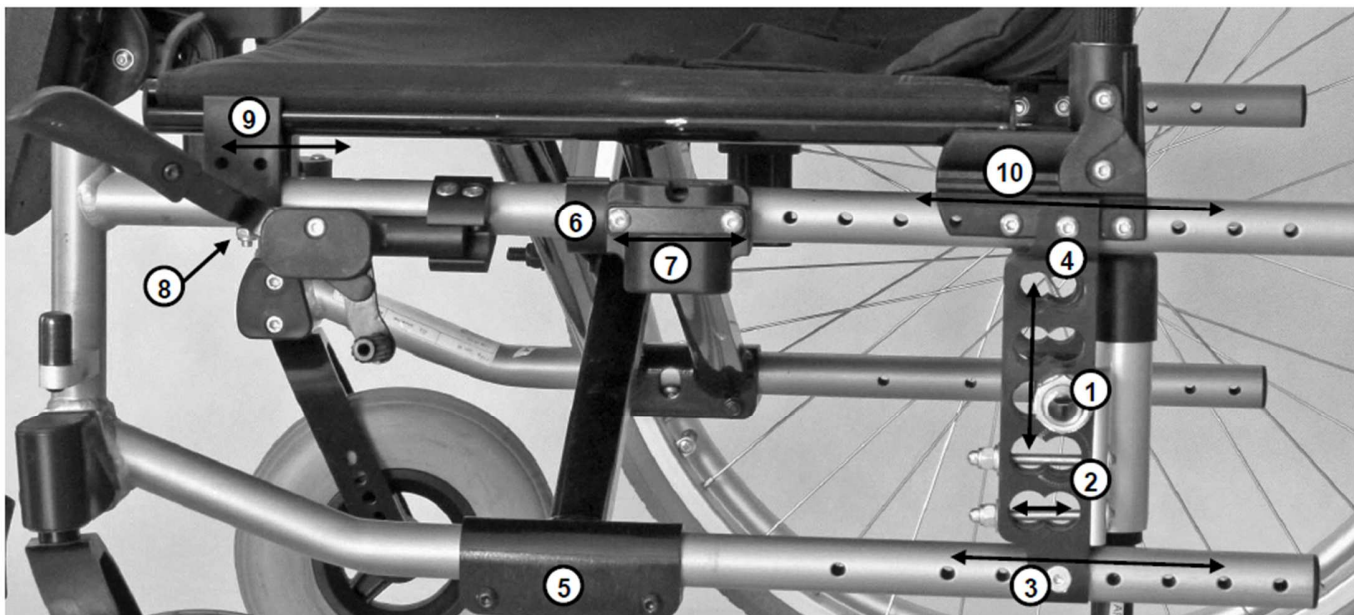

Justering af baghjul højde

Den giver mulighed for at ændre sædevinklen, sædehøjden og beslaget af baghjul af forskellige diameter.

For at flytte baghjul lodret:

- Løsriv baghjulet ved at bruge quick-release knappen.
- Skru af og løsriv hjulbøsningen (1) fra hullet i den sorte beslagsplade og sæt bøsningen ind i en af de andre 5 huller.
- Skru bøsningen til pladen og hold den rigtige rækkefølge af skiver og mørtikker
- Gentag alle ovenstående aktiviteter for det andet hjul.

ADVARSEL! Alle ovennævnte justeringer kan foretages af en kvalificeret servicebetjent eller fysioterapeut, som er uddannet i kørestoler indstilling af producenten.

Vandret justering af baghjulene

Vandret justering (for/bag) giver mulighed for at påvirke stabilitet og manøvreedygtighed af kørestolen og ændre sædedybden.

For brugere, der ønsker øget stabilitet fx. efter benamputation, akselpladen skal flyttes tilbage i forhold til sæderammen. Det anbefales, at personer efter en amputation anvender tipsikringer for at sikre kørestolen mod vælte. Bemærk også, at en længere hjulbase gør manøvrering sværere.

Hvis det er nødvendigt at øge manøvreedygtighed, akselplader kan flyttes frem. Det er lettere at manøvre en kørestol, der har hjulene sæt mest til frem, men stabilitet på bagsiden er lavere. Hvis hjulene er justeret på forsiden, skal kørestolen altid have tipsikringer aktive for at beskytte kørestolen mod vælte. Personer efter benamputation(er) må aldrig bruge kørestolen med hjulene sæt mest til frem. Risikoen for vælte er for høj.

Mindre vandret justering kan gennemføres lige som lodret justering:

- Løsriv baghjulet ved at bruge quick-release knappen.
- Skru af og løsriv hjulbøsningen (1) fra hullet i den sorte beslagsplade og sæt bøsningen ind i den anden tilgængelig hul.
- Skru bøsningen til pladen og hold den rigtige rækkefølge af skiver og mørtikker
- Gentag alle ovenstående aktiviteter for det andet hjul.

Hvis der ønskes flere justeringer, er det nødvendigt at flytte den hele beslagsplade:

- Skru boltene (3) & (4) af, som fastgør beslagspladen til rammerør.
- Flyt hjul beslagspladen til den ønskede position (frem eller tilbage) og så sæt boltene ind og stram dem igen.
- Gentag de ovenstående aktiviteter på den anden side af rammen.

ADVARSEL! Hvis positionen af baghjulene blev ændret, skal både forhjulene og bremsen justeres på samme måde.

ADVARSEL! Indstillinger på begge sider af rammen må være nøjagtig de same!

Justering af sædedybden

Sædedybden er afgjort med at måle brugeren i siddende stilling. Man måler afstanden mellem lændehvirvelsøjlen og knæet og bør sikre tilstrækkelig plads for klæder og lidt ekstra mellemrum for at ikke forhindre luftcirkulation i bagsiden af knæet.

Justering af Serien 40 dybde gennemføres ved at flytte bagrørets beslag (10) længere fra eller tættere på langs med øvre stang af siderammen.

BEMÆRK VENLIGST: bagakslen beslag (4) bør flyttes for at sikre stabilitet for brugeren. Dette kan gøres også ved at flytte den længere fra eller tættere på langs siderammens vandrette rør.

Hvis krydsstøtten (5) skal flyttes bagtil efter bagrørets beslag blev flyttet (10), kontrollér venligst om forsiden af sæderør er støttet på siderammen ved at flytte forsiden af sæderør support (9) bagtil på siderammer. For at justere:

- Løsn boltene (5) & (6) som fastgør krydset til rammen.
- Afmonter armlænets beslag (7) ved at løsne 2 bolte, der fastgør det til rammen
- Glid krydset med sæderør over i den rigtige position.
- Sæt ind og stram boltene igen for at fastgøre krydset og armlænets beslag i de nye positioner.
- Gentag alle ovenstående aktiviteter for den anden side af rammen.

Vandrette sæderør bliver flyttet under justeringen. På grund af dette, for at give tilstrækkeligt støtte og tilstrækkelige justeringsmuligheder vil det også være nødvendigt at justere 4 rør, der støtter sædet sådan, at alle hjørner af sædet er stabile.

For at gøre det efter justeringen af krydset og armlænet:

- Løsn bolt (8).
- Flyt supporten (9) sådan, at den giver stabil støtte til forhjørner af sædet. Så stram bolt (8) igen i den nye position.

Efterfølgende:

- Skru af de 3 bolte, der fastgør sædets og ryglænets support (10) til rammen.
- Flyt supporten (10) sådan, den giver stabil støtte til baghjørner af sædet. Så stram de 3 bolte igen i den nye position.
- Gentag alle ovenstående aktiviteter for den anden side af rammen.

ADVARSEL! Indstillinger på begge sider af rammen må være nøjagtig de same!

ADVARSEL! Hver ændring af sædets position påvirker direkte balancen og manøvreedygtigheden af kørestolen. Udover justering af sædets position, en genjustering af hjulenes position kan også være nødvendigt for at beholde sikkerhed og manøvreedygtighed af kørestolen.

9.2. Hjul

Baghjul

Afhængigt af ordrespecifikationen kan din kørestol være udstyret med 12, 16 eller 24 tommer baghjul. Hjulene kan have pneumatiske eller lufttætte dæk (PU). Andre størrelser og typer kan leveres på anmodning.

24 tommer hjul er udstyret med drivringe i standard. De bruges til at drive kørestolen frem ved brug af brugerens hænder. Kørestole, der er udstyret med mindre hjule (12 eller 16 tommer) kan drives frem kun af en ledsagerbetjent, der vil skubbe kørestolen bagfra.

Quick-release aksel

Afhængigt af ordrespecifikationen baghjulene kan være udstyret med quick-release aksler, der giver mulighed for at montere og afmontere baghjulene ret hurtigt.



For at aftage hjulet fra rammen:

- Tryk og hold udløserknappen (1) og så træk hjulet fra bøsningen.

For at påmontere hjulet igen:

- Placer akslens spids inde i bøsningen (2), tryk og hold udløserknappen (1), skub akslen hele vejen ind i bøsningen og slip knappen.
- Forsøg at trække hjulet fra bøsningen for at tjekke om det er fastgjort i sit position.

ADVARSEL! Pas på fingrene under montering og afmontering af hjulene. Stik fingrene ikke mellem eger eller mellem dæk og driverims.

ADVARSEL! Pas på fingrene når du driver kørestolen frem. Stik fingrene ikke mellem eger eller mellem dæk og driverims. For at beskytte fingrene kan du anvende egebeskyttere, tilgængelige som ekstra tilbehør.

Justering af lejehus




Hvis positionen af bag- eller forhjulene blev ændret, kan det være nødvendigt at justere vinklen af drejeakslen for at undgå hjul vibrationer og sikre en jævn, lige kørsel.

Drejeakslen hovedet (1) må altid sættes på 90°. Efter man har skiftet hjul set-up, justering af vinklen er nødvendigt.

For at justere vinklen af forgaflen:

- Løsgør 2 bolte (2) vist på billedet,
- Roter forgaflen bagtil eller fremad indtil akslens hoved (1) er på 90°.
- Stram boltene igen.

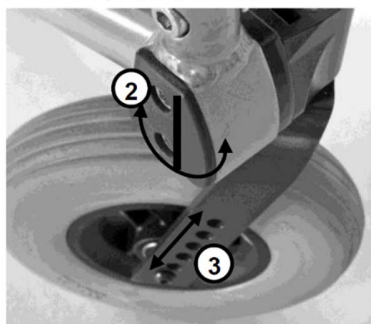

For at ændre sædets forvinkel over jorden kan man montere forhjulene i 6 forskellige positioner (3). De tre huller giver mulighed også for montere forhjulene af forskellige diameter.

ADVARSEL! Alle ovennævnte justeringer kan foretages af en kvalificeret servicebetjent eller fysioterapeut.

9.3. Bremses

Parkeringsbremses



Bremsen er trukket (kørestolen kører ikke)



Bremsen er udløst (kørestolen kører)

- For at trække bremsen, skub håndtaget frem (1). Nu er hjulene blokeret.
- For at udløse bremsen, træk håndtaget bagtil. (2). Nu kan hjulene køre.
- Altid træk bremsen hvis kørestolen står.
- Altid udløs bremsen inden du starter at køre på kørestolen.

ADVARSEL! Altid træk begge bremses når du går i eller af kørestolen.

ADVARSEL! Parkeringsbremses er ikke tegnet for at sænke farten af en kørende kørestol. De er kun beregnet til parkering.

Bremse position justering




Hvis din kørestol er udstyret med 12 eller 14 tommer baghjul, er bremse beslaget placeret nedre og bremsehåndtaget er længere.

Funktionsmåde og operation af bremsen forbliver det samme som beskrevet ovenfor.

Tromlebremses

Tromlebremses er ekstraudstyr og kan monteres på en kørestol kun af producenten eller en autoriseret servicestation. De er tegnet for at hjælpe ledsagerbetjenten til at manøvre kørestolen under kørsel. De kan også bruges som parkeringsbremses.

Sættet inkluderer 2 baghjul udstyret med integrerede tromlebremses (1), 2 bremsehåndtag (2), 2 små låsehåndtag for at øge parkeringsegenskaber (3) og 2 kabler for kobling af bremserne og håndtagene (4).

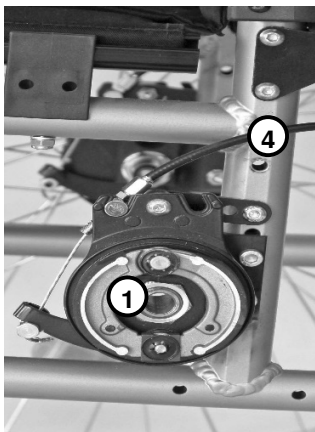

Tromlebremse

ADVARSEL! Tromlebremser kan kun betjenes af en ledsagerbetjent bagfra kørestolen. Tromlebremser er ikke tegnet for at blive betjent af brugeren siddende på kørestolen.

ADVARSEL! Kørestolen må aldrig efterlades uden opsyn med udløste bremser.

ADVARSEL! Altid træk bremserne hvis kørestolen ikke kører.



Bremserne er udløst



Bremserne er trukket og låst

- For at sænke farten af kørestolen, træk begge bremsehåndtag på samme tid (2) og reguler bremsekraft.
- For at stoppe kørestolen fuldstændigt, træk bremsehåndtagene hele vejen indtil den stopper.
- For at udløse bremserne, give slip på begge bremsehåndtag indtil de hænger løst.
- Du kan også bruge begge bremser for at manøvrere kørestolen ved at gradvis bremse af dette hjul i retningen du vil rette

For at bruge tromlebremserne som parkeringsbremser, må man låse dem i trukket position.


- For at gøre det: efter du har trukket begge bremsehåndtag (2) tryk op 2 små låseknapper (3) placeret under bremsehåndtagene.
- For at udløse de låste bremser, træk begge bremsehåndtagene op til skubbehåndtagene og så give slip på dem. Bremserne vil udløse selv.


9.4. Benstøtter – Standard, Opløftende* og Benamputerede støtter* (*valgfri)

Standard benstøtter (stål med længdejustering ved brug af bolte)

- Benstøtterne kan let roteres udad og aftages. De kan også roteres indad og under sædet for at give plads til ben.
- Benstøtterne er højdejusterbare. Hvis kørestolen er brugt udendørs, minimum afstand mellem fodpladerne og grunden skal være ca. 4-5 cm.
- For at muliggøre let forflytning i og fra kørestolen, kan fodpladerne nemt vippes op (A).

ADVARSEL! Det er forbudt at stå på fodpladerne. Kørestolen kan vælte.

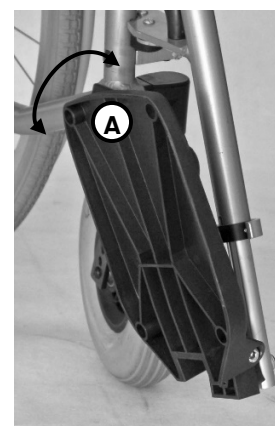

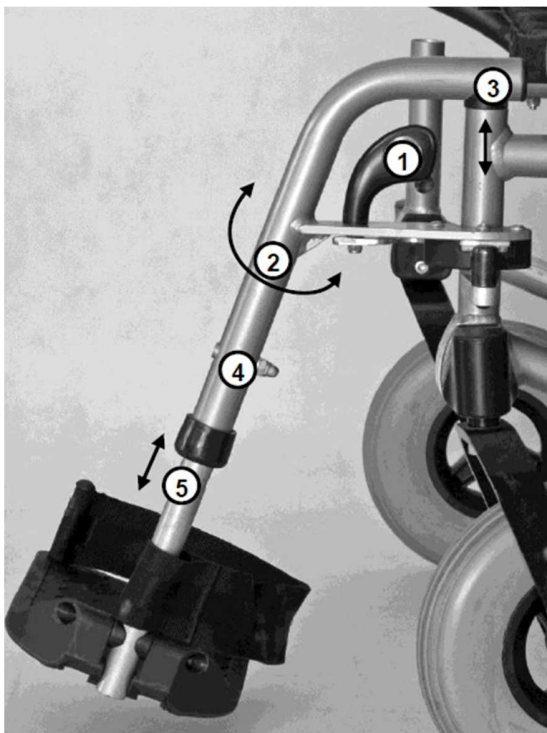

For at tilte eller aftage en benstøtte:

- Tryk på låseknappen (1).
- Tilt benstøtten (2) udad til cirka 45°.
- Så træk sidefoden opad for at aftage den fra kørestolens ramme (3).

For at fastgøre benstøtten:

- Hold den ved siden af røret, cirka på 45° i forhold til rammen.
- Sæt spidsen af benstøtten ind i hullet på rammen (3).
- Når benstøtten er monteret på rammen, tilt den frem (2). Benstøtten bør locke automatisk.
- Kontrollér om den højre og venstre benstøtte er monteret på den rigtige side af rammen.

For at justere længden af benstøtten:


- Skru af og fjern bolten (4).
- Juster længden ved at slide nedre røret (5) opad eller nedad og sæt hullerne på det indre og ydre rør sammen.
- Sæt bolten ind og skru tæt.

Standard benstøtter (aluminium med skruevinge justering)

- Benstøtterne kan let roteres udad og aftages.
- Benstøtterne er højdejusterbare. Hvis kørestolen er brugt udendørs, minimum afstand mellem fodpladerne og grunden skal være ca. 4-5 cm.
- For at muliggøre let forflytning i og fra kørestolen, kan fodpladerne nemt vippes op (A). Fodpladerne er vinkeljusterbare.

ADVARSEL! Det er forbudt at stå på fodpladerne. Kørestolen kan vælte.



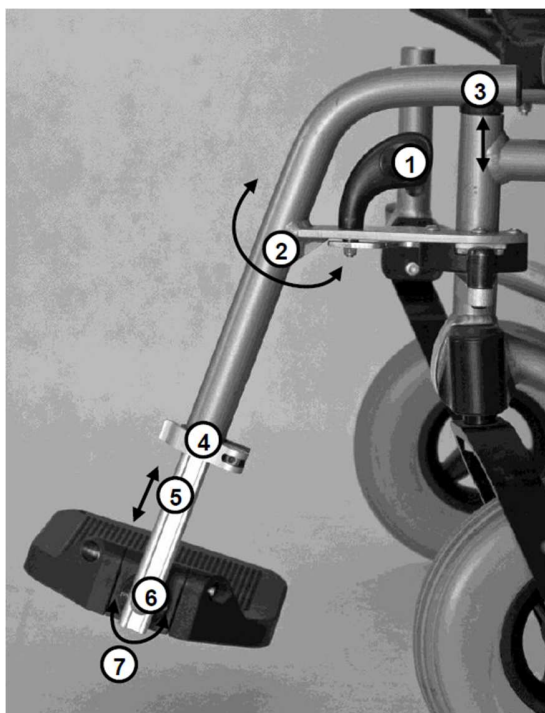

For at tilte eller aftage en benstøtte:

- Tryk på låseknappen (1).
- Tilt benstøtten (2) udad til cirka 45°.
- Så træk sidefoden opad for at aftage den fra kørestolens ramme (3).

For at fastgøre benstøtten:

- Hold den ved siden af røret, cirka på 45° i forhold til rammen.
- Sæt spidsen af benstøtten ind i hullet på rammen (3).
- Når benstøtten er monteret på rammen, tilt den frem (2). Benstøtten bør locke automatisk.
- Kontrollér om den højre og venstre benstøtte er monteret på den rigtige side af rammen.

For at justere længden af benstøtten:

- Skru af og fjern bolten (4).
- Juster længden ved at slide nedre røret (5) opad eller nedad og sæt hullerne på det indre og ydre rør sammen.
- Sæt bolten ind og skru tæt.


For at justere fodpladens vinkel:


- Løsn bolten (6).
- Juster fodpladens position (7).
- Skru bolten tæt.

Eleverbare benstøtter (aluminium)

- Disse benstøtter har mange forskellige justeringsmuligheder. Benstøtterne kan let roteres udad og aftages.
- For at muliggøre let forflytning i og fra kørestolen, kan fodpladerne nemt vippes op. (A)

ADVARSEL! Det er forbudt at stå på fodpladerne. Kørestolen kan vælte.

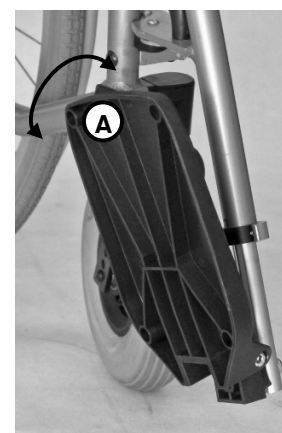

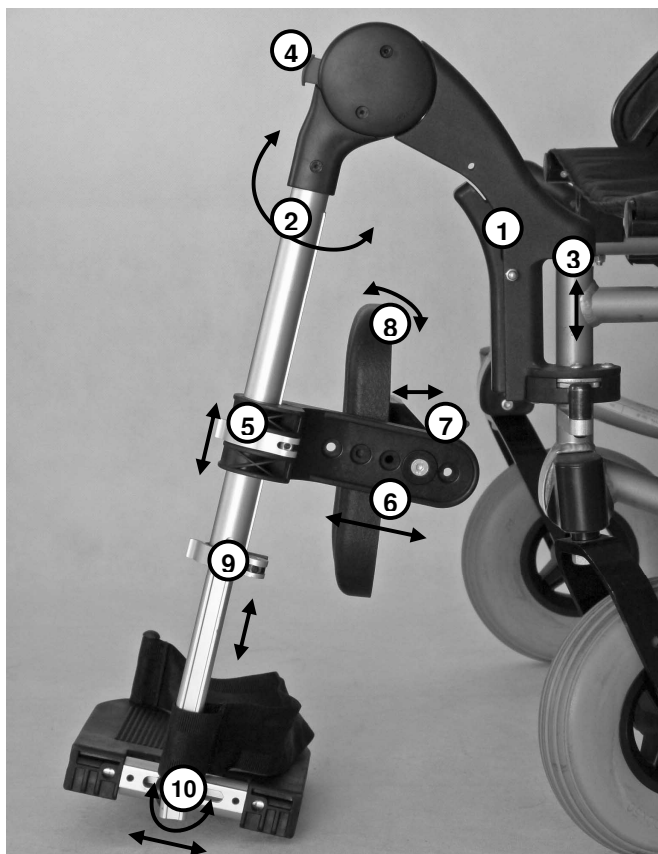

For at tilte eller aftage en benstøtte:

- Tryk på låseknappen (1).
- Tilt benstøtten (2) udad til cirka 45°.
- Så træk opad for at aftage den fra kørestolens ramme (3).

For at fastgøre benstøtten:

- Hold den udenfor, cirka på 45° i forhold til rammen.
- Sæt spidsen af benstøtten ind i hullet på rammen (3).
- Når benstøtten er monteret på rammen, tilt den frem (2). Benstøtten bør locke automatisk.
- Kontrollér om den højre og venstre benstøtte er monteret på den rigtige side af rammen. For at justere vinklen af benstøtten:
- Tryk på den røde knap (4).
- Når du holder knappen trukket, løft eller sænk benstøtten med hånden indtil du finder den ønskede vinkel.
- Give slip til knappen.

For at justere højden af lægstøtten:

- Give slip til låseknappen (5).
- Juster højden.
- Lås låseknappen.

For at justere dybden af lægstøtten:

- Løsn og fjern bolten (6).
- Sæt lægstøtten ind i 1 af de 5 huller.
- Sæt bolten ind og skru tæt.

For at muliggøre en nem forflytning i og fra kørestolen:

- Tilt lægstøtten bagtil ved at trykke på den røde stang (7).
- For at sætte lægsupporten igen i den oprindelige stilling, skub den frem indtil den låser selv.

For at justere vinklen af lægsupporten:

- Tilt den frem eller bagtil (8).

For at justere længden af benstøtten:

- Slå fra låseknappen (5).
- Juster længden ved at slide nedre røret (9) opad eller nedad.
- Lås låseknappen igen.

ADVARSEL! Hvis kørestolen er brugt udendørs, minimum afstand mellem fodpladerne og grunden skal være ca. 4-5 cm.



For at justere fodpladens vinkel eller dybde:

- Løsn bolten (10).
- Juster fodpladens position.
- Skru bolten tæt.

Eleverbare benstøtter (stål)

- Disse benstøtter har mange forskellige justeringsmuligheder. Benstøtterne kan let roteres udad og aftages.
- For at muliggøre let forflytning i og fra kørestolen, kan fodpladerne nemt vippes op. (A)

ADVARSEL! Det er forbudt at stå på fodpladerne. Kørestolen kan vælte.

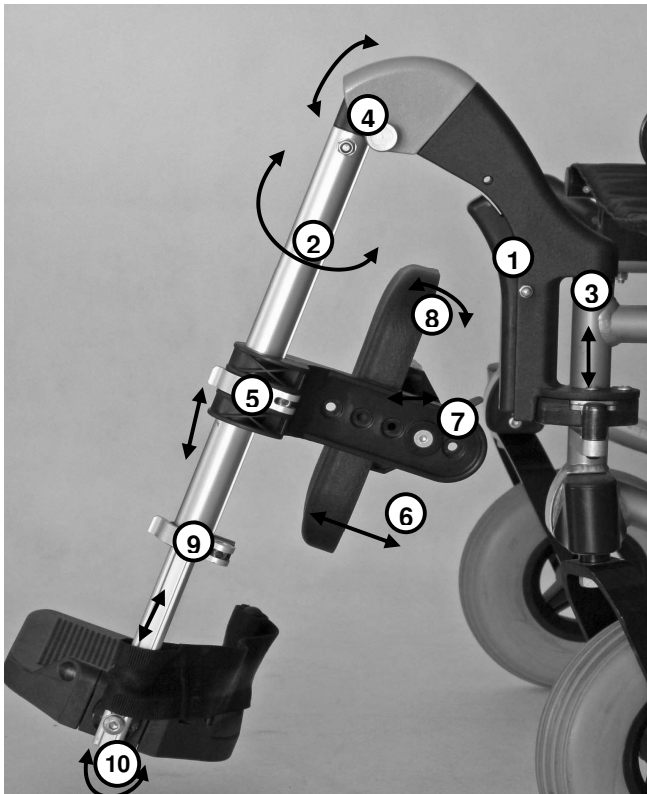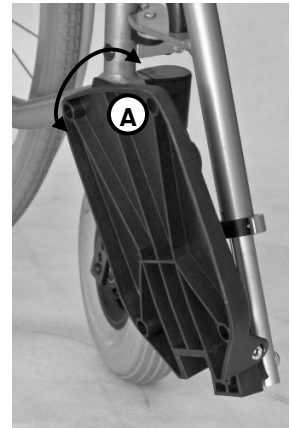

For at tilte eller aftage en benstøtte:

- Tryk på låseknappen (1).
- Tilt benstøtten (2) udad til cirka 45°.
- Så træk opad for at aftage den fra kørestolens ramme (3).

For at fastgøre benstøtten:

- Hold den udenfor, cirka på 45° i forhold til rammen.
- Sæt spidsen af benstøtten ind i hullet på rammen (3).
- Når benstøtten er monteret på rammen, tilt den frem (2). Benstøtten bør locke automatisk.
- Kontrollér om den højre og venstre benstøtte er monteret på den rigtige side af rammen.

For at justere vinklen af benstøtten:

- Træk det metalliske lås bagtil (4).
- Når du holder låset trukket, løft eller sænk benstøtten med hånden indtil du finder den ønskende vinkel.
- Give slip til låset.

For at justere højden af lægstøtten:

- Give slip til låseknappen (5).
- Juster højden.
- Lås låseknappen.

For at justere dybden af lægstøtten:

- Løsn og fjern bolten (6).
- Sæt lægstøtten ind i 1 af de 5 huller.
- Sæt bolten ind og skru tæt.

For at muliggøre en nem forflytning i og fra kørestolen:

- Tilt lægstøtten bagtil ved at trykke på den røde stang (7).
- For at sætte lægsupporten igen i den oprindelige stilling, skub den frem indtil den låser selv.

For at justere vinklen af lægsupporten:

- Tilt den frem eller bagtil (8).

For at justere længden af benstøtten:

- Slå fra låseknappen (5).
- Juster længden ved at slide nedre røret (9) opad eller nedad.
- Lås låseknappen igen.

ADVARSEL! Hvis kørestolen er brugt udendørs, minimum afstand mellem fodpladerne og grunden skal være ca. 4-5 cm.

For at justere fodpladens vinkel eller dybde:

- Løsn bolten (10).
- Juster fodpladens position.
- Skru bolten tæt.

Benamputerede støtter

- Disse støtter er tegnet specielt for personer efter benamputationer
- Disse støtter kan let roteres udad og aftages.
- Disse støtter er dybde-, højde- og vinkeljusterbare.

ADVARSEL! Det er forbudt at stå eller sidde på støtterne. Kørestolen kan vælte.



For at justere højden af støtten:

- Løsn 2 skruer (1) der fastgør støtten til konsollen
- Juster dybden.
- Skru skruerne tæt.

For at fastgøre/aftage støtten:


- Simpelthen sæt den ind eller tag af fra rammen (2).

For at justere højden og/eller vinklen af støtten:

- Løsn knoppen (3)
- Juster positionen.
- Stram knoppen.

9.5. Armlæn

Armlæn (drop-in)

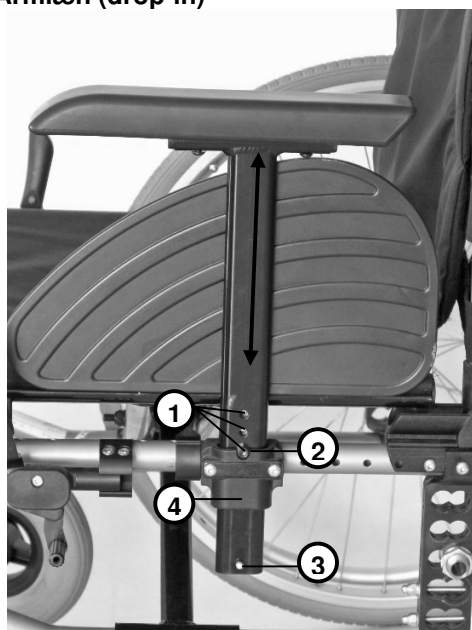

Armlæn er højdejusterbare og aftagelige for at muliggøre overføring mellem kørestolen og andet sted nemmere.

For at justere armlænets højde:

- Vælg et af hullerne (1) placerede op armlænets støtte og skru bolten in i det (2).

For at tage armlænet af kørestolen:


- Træk det op. Låseknappen (3) beskytter armlænets mod tilfældelig afmontering. Tryk knappen for at slide armlænet fra grebet. (4).

For at fastgøre armlænet til rammen:

- Sæt spidsen af armlænets støtte ind i grebet, tryk på låseknappen og skub armlænets ned.
- Armlænet vil stoppe på bolten, der lige blev sæt for højdejustering.

ADVARSEL! Armlæn må aldrig bruges som greb til løftelse eller flytning af kørestolen.

Armlæn (tilt bagtil) – standard greb

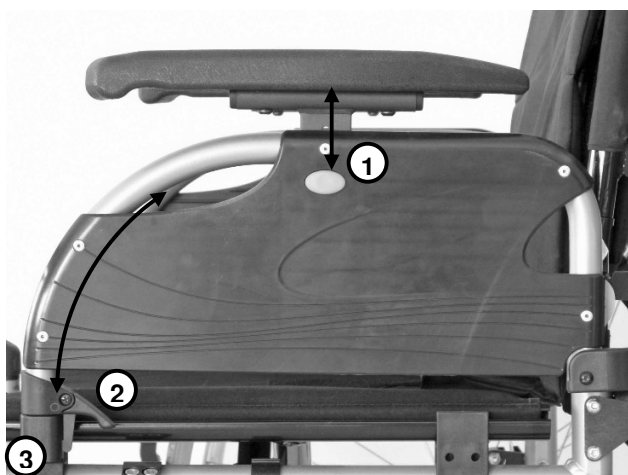

ADVARSEL! Armlæn må aldrig bruges som greb til løftelse eller flytning af kørestolen.

Armlænen er højdejusterbare. De kan også løftes og tiltes bagtil at muliggøre overføring mellem kørestolen og andet sted nemmere.

For at justere armlænets højde:

- Tryk på og hold den ovale knap **(1)** placeret på siden af panelen.
- Brug den anden hånd til at sætte den ønskende højde af armlænets pude. SÅ giv slip til knappen.


For at tilte armlænet op og bagtil:

- Tryk på låseknappen **(2)** og løft armlænet op.

For at lukke armlænet:

- Simpelthen sænk det indtil spidsen slider tilbage til grebet **(3)** og låser selv automatisk.

Armlæn (Tilt bagtil) – nem grib

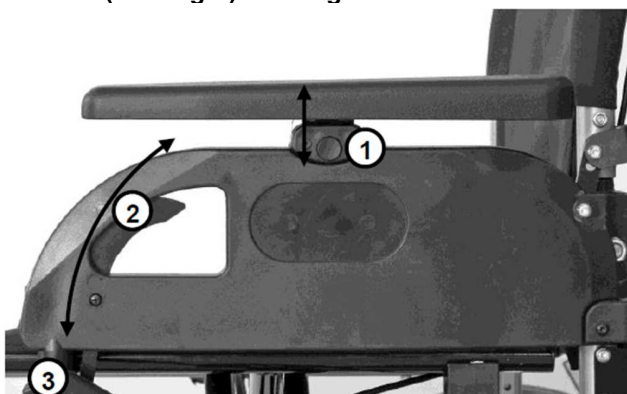

ADVARSEL! Armlæn må aldrig bruges som greb til løftelse eller flytning af kørestolen.

Armlænen er højdejusterbare. De kan også løftes og tiltes bagtil at muliggøre overføring mellem kørestolen og andet sted nemmere.

For at justere armlænets højde:

- Tryk på og hold den ovale knap **(1)** placeret på siden af panelen.
- Brug den anden hånd til at sætte den ønskende højde af armlænets pude. SÅ giv slip til knappen.

For at tilte armlænet op og bagtil:

- Tryk på låseknappen **(2)** og løft armlænet op.

For at lukke armlænet:

- Simpelthen sænk det indtil spidsen slider tilbage til grebet **(3)** og låser selv automatisk.

10. Tilbehør

10.1 Hovedstøtte Hovedstøtte



Hovedstøtter er tegnet for at give yderligere stabilitet for af brugerens nakke og hoved.

Hovedstøtte beslag består af 2 speciale greb (1) fastgjort til ryglænets rør og breddejusterbar krydsbom (3).

ADVARSEL! Dette udstyr kan monteres på kørestolen og justeres af en kvalificeret servicebetjent eller fysioterapeut. Krydsbom er fastgjort til grebe (1) med 2 låsestifter. (2).



For at tage hovedstøtten af (fx. for at folde kørestolen): Træk låsestiften bagtil (2) og løft bommen opad. Gentag på den anden side af kørestolen.

For at fastgøre hovedstøtten, gør det samme i modsættende rækkefølge.

Det er muligt af justere højden, dybde og rotation af hovedstøtten for at opnå optimal komfort af brugeren.

For at justere højden af hovedstøtten:

- Løsn håndtaget (4) og sæt den lodrette hovedstøtte til den ønskende højde og så stram håndtaget igen.

For at justere dybden af hovedstøtten:


- Løsn knoppen (4) og sæt den vandrette hovedstøtte til den ønskende højde og så stram knoppen igen.

For at rotere hovedstøtten, drej den om leden (6), indtil du finder den ønskende position.

ADVARSEL! Gennemfør justeringen altid med brugeren siddende i kørestolen.

10.2. Højdejusterbare skubbehåndtag

Højdejusterbare skubbehåndtag

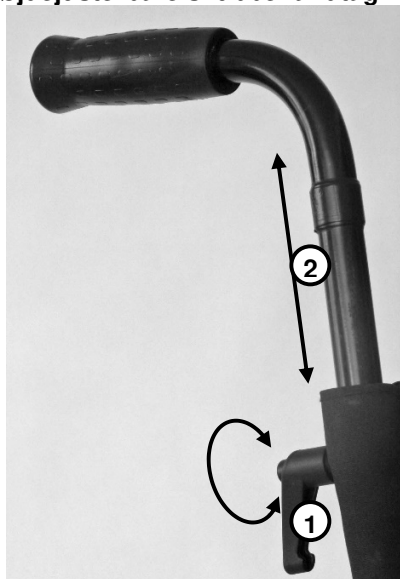

Man kan justere højden af skubbehåndtagene i forhold til højden af ledsagerbetjenten.


ADVARSEL! Begge skubbehåndtag bør justeres til samme højde.

For at ændre højden af skubbehåndtag:

- Løsn låsestangen (1).
- Juster håndtaget (2) til den ønskede højde.
- Stram låseknappen igen (1).
- Gentag ovenstående trin for det andet skubbehåndtag.

10.3. Tilbagelænet rygrør

Tilbagelænet ryglæn (gas fjeder)

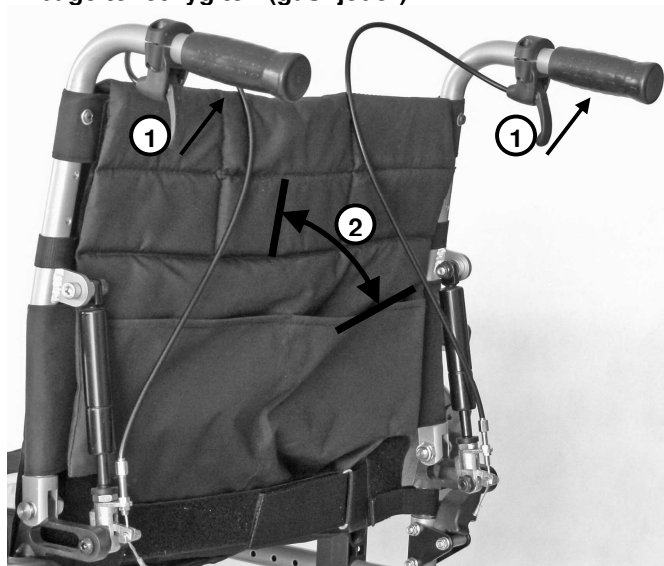

Det er muligt for ledsagerbetjenten at justere ryglænets vinkel og opnå den ønskede komfort for bruger.

For at ændre ryglænets vinkel:

- Grib skubbehåndtagene og tryk de 2 justeringshåndtag med fingrene (1).
- Hold håndtagene og juster ryglænet opad eller nedad til den ønskede position (2).
- Giv slip til begge håndtag (1).




ADVARSEL! Altid tryk og giv slip til begge justeringshåndtag på samme tidspunkt og juster vinklen af begge ryglænets rør til samme vinkel.

ADVARSEL! Gennemfør justeringen altid med brugeren siddende i kørestolen.

ADVARSEL! Altid træk parkeringsbremserne når du justerer ryglænets vinkel.

10.4 Stabilitet krydsbom

Stabilitet krydsbom

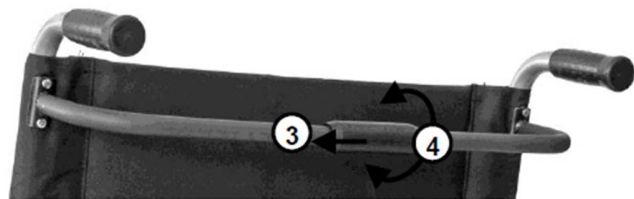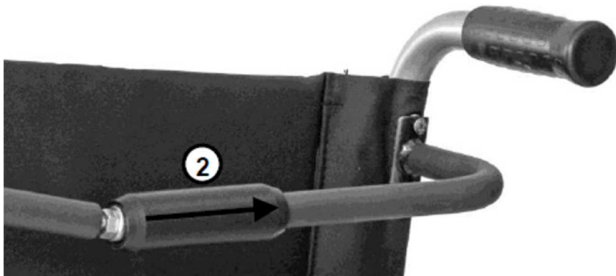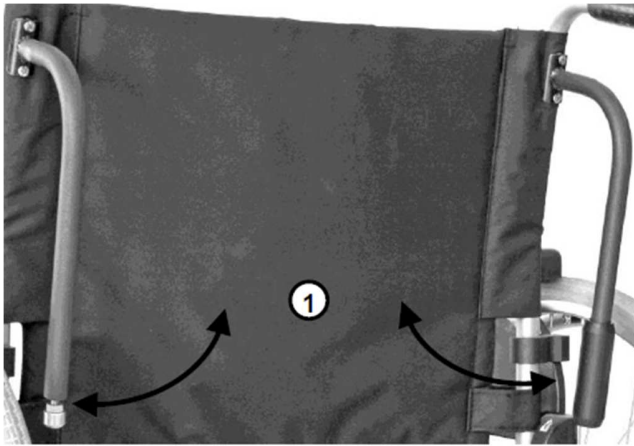

Stabilitet krydsbommen er tegnet for at give mere stivhed til ryglænets rør.

Stabilitet krydsbommen monteres på kørestolen med 4 skruer.

ADVARSEL! Denne enhed kan monteres og justeres på kørestolen kun af en kvalificeret servicebetjent eller en fysioterapeut.

Stabilitet krydsbommen består af 2 halvdele, som skal frakobles for at folde kørestolen. Efter kørestolen blev udfoldet igen, skal de 2 halvdele forbindes igen.

For at forbinde de 2 halvdele af stabilitet krydsbommen:

- Grib begge løse ender af bommen og løft dem imod hinanden **(1)**.
- Skub den plast stabilitet bøsning tilbage **(2)** og sæt den på den metallisk spids på den anden del af krydsbommen.
- Slid den plast bøsning på spidsen **(3)** og drej den **(4)** for at sikre forbindelsen. Der vil være lidt modstand når du forbinder de 2 dele - det er helt normalt for at brede bagrørene ud.
- Når krydsbommen er fastgjort, skal den give mere stivhed til konstruktionen.

For at frakoble krydsbommens halvdele:

- Gør den ovenstående i modsættende rækkefølge.

10.5 Justerbar spændkraft af ryglæn

Justerbart ryglæn




Du kan justere ryglænets spændkraft sådan, at opfylde brugerens behov.

For at justere ryglænet:


- Rul op bagdelen af polstring (1).
- Juster spændkraften af 6 Velcro bæltter (2) indtil højeste komfort er opnået.
- Rul ned bagdelen af polstring (1) for at dække Velcro bæltterne.

10.6 Side kropstøtte

Sidestøtter til krop

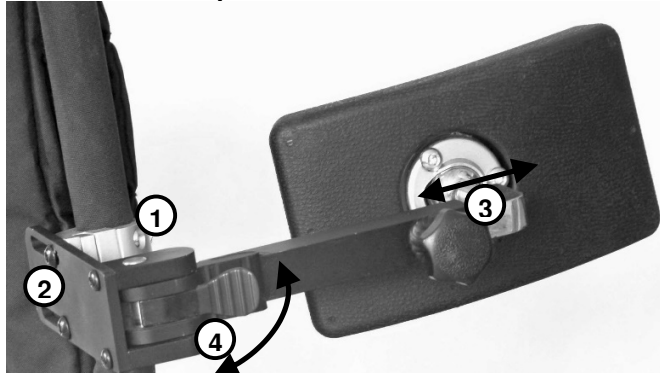

Side overblik

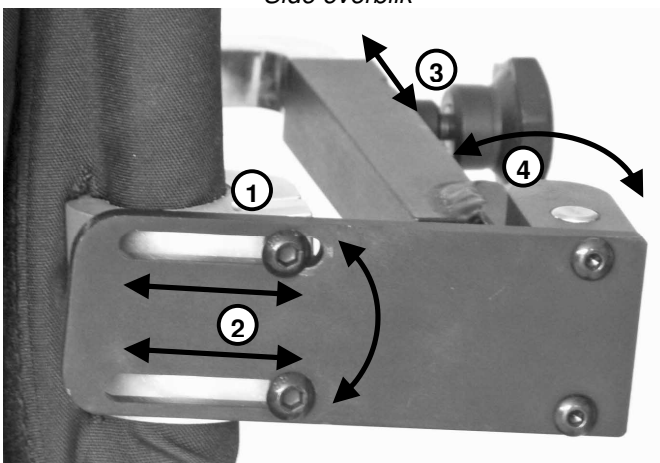

Bag overblik

Sidestøtter giver yderligere stabilitet til brugerens krop. Støtterne er fastgjort til ryglænets rør ved brug af en speciel klemme. (1).

ADVARSEL! Denne enhed kan monteres og justeres på kørestolen kun af en kvalificeret servicebetjent eller en fysioterapeut.

Sidestøtten er monteret på klemmen (1) ved brug af 2 bolte (2). Dybden, bredden og vinklen af støtten kan justeres for at opnå den optimale komfort af brugeren.

For at ændre vinklen og/eller bredden af støtten:

- Løsn boltene (2), juster støtten til den ønskende position og så stram boltene igen.

For at justere dybden af støtten:

- Løsn knoppen (3), juster støtten til den ønskende position og så stram knoppen igen.

Det er muligt at slå støtten sidelæns for at muliggøre en nem overførsel af brugeren. For at slå støtten sidelæns:

- Tryk på den røde låseknop (4) med din finger og slå støtten til side.
- Støtten vil låse automatisk efter den blev slået frem igen.

ADVARSEL! Gennemfør justeringen altid med brugeren siddende i kørestolen.

10.7 Tipsinkringer

Tipsikringer (svinge til side) – monteret på venstre side (bag overblik)

Dette yderligere udstyr øger bagstabilitet af kørestolen og brugerens sikkerhed. Det anbefales særligt for brugere efter benamputationer, men vi foreslår at alle brugere anvender det.

ADVARSEL! Montering af tipsikringer bør gennemføres af en kvalificeret servicebetjent eller en fysioterapeut.



Tipsikringen fungerer når det lille hjul er vendt tilbage. Hvis det er placeret under kørestolens ramme, fungerer den ikke.

For at aktivere eller slukke tipsikringen, grib det vandrette rør og træk det ned.



Så drej det om dets lodrette aksel til den ønskende position.




Giv slip til røret og det låser selv i den ønskende position.

Tipsikringer (svinge op) – monteret på venstre side (bag overblik)


Dette yderligere udstyr øger bagstabilitet af kørestolen og brugerens sikkerhed. Det anbefales særligt for brugere efter benamputationer, men vi foreslår at alle brugere anvender det.

ADVARSEL! Montering af tipsikringer bør gennemføres af en kvalificeret servicebetjent eller en fysioterapeut.

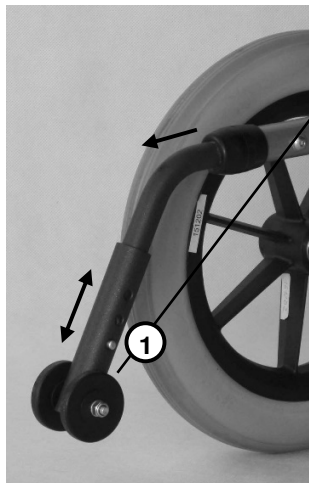


Tipsikringen fungerer når det lille hjul er sæt ned. Hvis det er sæt op, fungerer den ikke.

For at aktivere eller slukke tipsikringen, grib den vandrette rør og træk det tilbage.

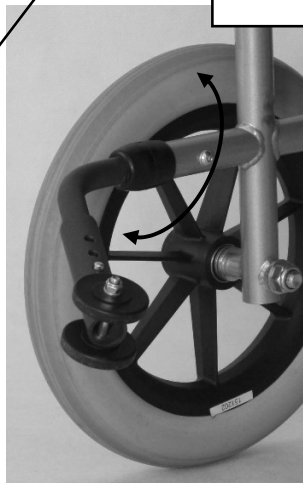

Så drej det om dets vandrette aksel til den ønskende position.

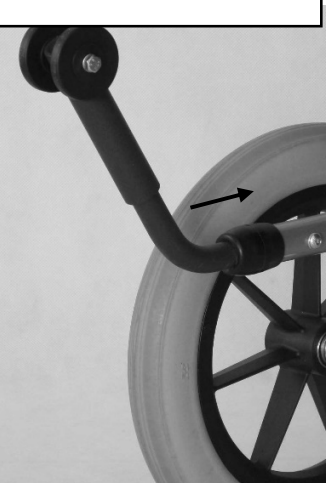


Giv slip til røret og det låser selv i den ønskende position.

Afstanden mellem hjulet og jorden kan justeres ved at trykke på den røde låseknop (1) og slide hjulet op eller ned.

Tipsikringen (Slide op) – monteret på venstre side (bag overblik)


Dette yderligere udstyr øger bagstabilitet af kørestolen og brugerens sikkerhed. Det anbefales særligt for brugere efter benamputationer, men vi foreslår at alle brugere anvender det.

ADVARSEL! Montering af tipsikringer bør gennemføres af en kvalificeret servicebetjent eller en fysioterapeut.

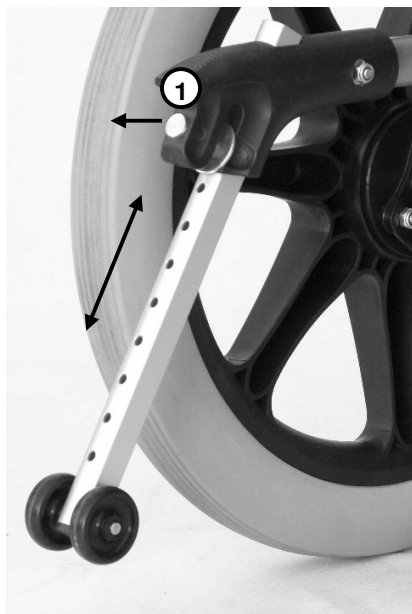

Tipsikringen fungerer når det lille hjul er sæt ned tæt på jorden. Hvis det er oppe, fungerer den ikke.

For at aktivere eller slukke tipsikringen, træk låsestiften (1) og hold den and hold it.

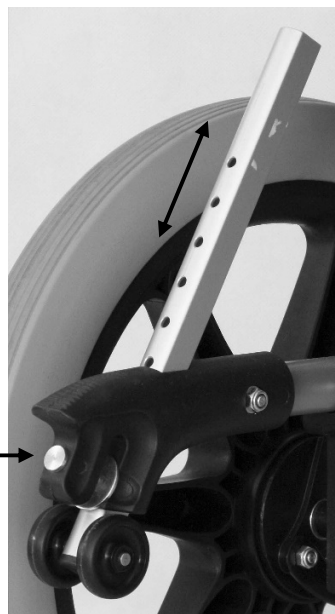

Brug din anden hånd til at justere tipsikringen til den ønskende retning (op/ned). Så giv slip til låsestiften og tipsikringen vil låse selv automatisk i den ønskende position.

Kontakt info til SeniorSam A/S

SeniorSam A/S

Sundbyvej 19

DK-7752 Snedsted

Tlf. : +45 96 18 44 88

CVR.: 33082037

Email: info@seniorsam.dk

www. www.seniorsam.dk



Rehasense® Europe

Manufacturer:

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45g

97-300 Piotrków Trybunalski

Polen

www.rehasense.com

info@rehasense.com



REHASENSE