



Brugervejledning

AC860 Knærollator med bremse fra SeniorSam A/S



Velegnet som transportmiddel til brugere med bevægelsesbesvær.

AC860 Knærollator

1. Medmindre andet er angivet, bør alle knærollatorer justeres til brugeren før anvendelse. Anvendelsen er "ikke" til kørestolsbrug eller som en relax stol.
2. Når du skal samle knærollatoren, skal du være opmærksom på, at kroppen hældning ikke er for stor, for at undgå at knærollatoren vælter.
3. Inden du bruger knærollatoren, skal du kontrollere, om styr og håndtag er blevet løse. Hvis ja, kontakt venligst din forhandler.
4. Pas godt på din knærollator og dig selv, især i stigende eller faldende terræn. Hvor forlæns hældning er større end eller lig med 15°, baglæns hældning er større end eller lig med 7°, og rulning er større end eller lige med 3,5°, vær ekstra opmærksom.
5. Undlad venligst, at bøje dig under din kørsel for at samle genstande op på jorden.
6. Gå ikke op eller ned af trapper med knærollatoren uden hjælp.
7. Knærollatoren er velegnet til kørsel på fladt underlag. Når der er forhindringer foran, bør brugeren benytte en omvej for at undgå at knærollatoren hælder eller vælter. Når brugeren skubber knærollatoren, bør hastigheden ikke overstige 3-5 km/t. Gå forsigtigt med rollatoren.
8. Knærollatoren bør ikke benyttes på rulletrapper, ellers kan og vil det forårsage alvorlig personskade.
9. Når du flytter knærollatoren, skal du tage fat i den faste hoveddel/sædet i stedet for at tage fat i de bevægelige dele, såsom styret.
10. Når du bruger knærollatoren på en skrå vej, må du ikke pludselig ændre retning, da det kan forårsage et styrt. På vej ned af bakker, må du ikke lave hårde og pludselige opbremsninger, da det kan få forenden af rollatoren til at vælte. Kør i stedet med en støt, langsom hastighed.
11. Knærollatorens nominelle lastvægt er 110 kg, og brugervægten anbefales til max. 100 kg.
12. I brugsperioden bør rollatoren rengøres en gang om ugen. Ved brug efter infektionssygdomme bør vaskes efter hver brug.
13. Knærollatoren kan benyttes til både ude og indendørs brug.

Rengøring

1. Rengør med en våd klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel. Rengør hjulene med varmt vand og skånsomt rengøringsmiddel og tør af med en ren klud.

Daglig vedligehold

1. Sørg for at alt hvad der kan spændes, altid er fastspændt og kontroller knærollatoren regelmæssigt for at sikre, at bremsen, sæde, styrehåndtag og hjul fungerer korrekt, og at alle dele er fastspændte.
2. Skift enhver defekt med det samme. Brug ikke håndtaget, hvis det er løst, udskift det eller kontakt din forhandler med det samme.
3. Sørg for at bremsen fungerer normalt. Bremserne kan blive løse med tiden, men kan blive spændt af din forhandler. Hvis bremserne ikke er sikkert spændte, kan det forårsage personskader.
4. Knærollatoren skal opbevares i et ventileret, tørt og køligt rum. Må ikke stå i nærheden af varmekilder eller ved ætsende gas.

Tekniske informationer

- Designet til en person
- Aluminiumsramme, hjul og knæsupport pude
- Dobbelt håndbrems
- Let at folde sammen til transport
- Diameter hjul: 203mm

- Mål mellem hjul: 25,5 cm
- Total bredde: 43 cm
- Total længde: 82 cm
- Sædemål: 18 x 36,5 cm
- Højdejustering sæde: 43,5 – 58,5 cm
- Højdejustering styr: 82 – 103 cm
- Nettovægt: 9,8 kg
- Max. Brugervægt: 100 kg



SeniorSam A/S

Sundbyvej 19

DK – 7752 Snedsted

info@seniorsam.dk

CVR DK33082037