

**Brugervejledning.****AC863 – badestol på hjul sammenklappelig.****Formål.**

Badestolen er beregnet til ekstra hjælp i badeværelset for personer med nedsat mobilitet, og må ikke benyttes til andre formål.

Før brug.

Før brug og før brugeren sætter sig i badestolen bremses de 2 bremsehjul og badestolen gennemgås for at stolen står helt plant og stabilt.

Tjek regelmæssigt, at produktet er 100% stabilt og eventuelle skruer sides fastspændte.

Vær opmærksom på.

- Er der tegn på at stolen er defekt, må badestolen ikke benyttes og der bedes tages kontakt til forhandleren.
- Har brugeren balanceproblemer, så sikrer dig at brugeren er under opsyn under badningen.
- Produktet må under ingen omstændigheder omforandres, så sikkerhedsforanstaltningerne forringes. I tilfælde af om forandringer bortfalder garantien.
- Overskrid ikke den anviste brugervægt.

Rengøring.

Rengør badestolen med almindelige og ikke slibende rengøringsmidler såsom mild sæbe og vand. Brug ikke skuresvamp og blegemiddel

Brusebads stol

- Foldbar aluminiumsramme med armlæn og fodstøtte
- Hjul: 4 stk, 2 med bremse
- Plast PE sæde: Ja
- Samlet bredde: 63 cm
- Sædebredde: 45 cm
- Sædedybde: 40 cm
- Sædehøjde: 54 cm
- Samlet længde: 40 cm
- Total højde: 92 cm
- Materiale: Alu, PU, Plast
- Sædeudskæring for intimvask: Ja
- Kartonstørrelse: 109*24*52 cm
- Max brugervægt: 100 kg
- Produkt vægt: 5,2 kg
- Garanti: 2 år

Samling.

Produktet er foldet sammen så det fylder mindst muligt.

Når du åbner og tager badestolen ud af kassen, træk stellet ud og fra hinanden.

Klik sædet nedad i vandret position, og sikrer dig at de 2 sorte jernfoldninger også er i vandret position

Før brug skal du sikre dig, at alle skruer er stramme, og rammen er stabil og står sikkert på alle 4 hjul. - Dermed er badestolen udfoldet og klar til brug.



Badestol på hjul sammenklappelig **CE** **MD**

MODEL: CA364L/AC863

2023-05-09 LOT 20230509 20230509

NON STERILE

(01)497223326030601#

FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO.,LTD
Pingnan Industrial Area , Guicheng Nanhai District , 528251 Foshan
City,Guangdong P.R.China
Tel: +86-757-81816518 Fax : +86-757-81816523
E-mail: info@caremax-med.com Web Site: www.caremax-med.com

EC REP SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522,Unit 1.7,2909VA
Capelle aan den IJssel,The Netherlands
SRN: NL-AR-000000247

Doc No.: CE-MDR-TCF001-07 Rev: A/0

SeniorSam A/S

Sundbyvej 19

7752 Snedsted

Danmark

CVR DK33082037

Info@seniorsam.dk