

Brugervejledning



Læs den komplette brugervejledning omhyggeligt, før du bruger indendørsrollatoren første gang. Opbevar brugsanvisningen sikkert, så den er tilgængelig til senere brug.

Anvendelsesformål:

Denne indendørs rollator er velegnet til daglig brug. Det lette og smalle konstruktionsdesign giver nem transport, og den robuste aluminiumsramme giver stabilitet og støtte, når den er i brug.

Produktbeskrivelse



| Nr. | Del beskrivelse | Nr. | Del beskrivelse |
|-----|----------------------------|-----|-----------------|
| 1 | PU Håndtag | 7 | Bremsekabel |
| 2 | Bremsekabel | 8 | Forgaffel |
| 3 | Højdejusterings del | 9 | Forhjul |
| 4 | Bakke | 10 | Baghjul |
| 5 | Kurv med stofpose | 11 | Bremsedel |
| 6 | Foldemekanisme udløserknop | | |

Monteringsvejledning:

1. Tag rollatoren ud af æsken og kontroller indholdet og emballagen for skader eller mangler. Den indendørs rollator samles og leveres i foldet form.

| | |
|--------------|----------------|
| Hovedramme*1 | Bakke*1 |
| Håndtag*1 | Brugermanual*1 |
| Kurvetaske*1 | |



2. Sæt den indendørs rollator i oprejst stilling og fastgør kurv til at folde det ud;
3. Åbn de grå højdejusteringsbeslag på begge sider af rammen; (Se billeder)
4. Fastgør håndtagene i rammen og luk den grå højdejusteringsdel, så begge sider er samme højde;
5. Placer bakken på rammen;

Højdejustering:

- * For at justere højden skal du åbne de grå højdejusteringsbeslag og justere håndtagene til en passende højde;
- * Luk de grå justeringsbeslag på begge sider, og sørg for, at de er forsvarligt låst og justeret til samme højde;

Bremsefunktion:

- * Klem bremsehåndtaget opad for at bremse den indendørs rollator;
- * Tryk ned i bremsehåndtaget for parkering;

Fold og opbevar:

- * Fjern bakken og tryk på den gule foldemekanismeknap for at folde og opbevare den indendørs rollator;



Sikkerhedsinstruktioner:

1. Test bremsene før brug, og kontroller bremsene efter hver højdejustering.
2. Hæng ikke genstande på håndtaget eller bremsehåndtaget.
3. Kontroller før hver brug, om indendørsrollatoren er helt udfoldet, og om håndtagene er i samme højde.
4. Brug ikke rollatoren på trapper, men kun på jævnt underlag! Alle fire hjul skal stå på gulvet, ellers er der fare for at vælte!
5. Indendørsrollatoren kan tåle en belastning på op til 100 kg! Bæretasken og bakken kan begge fyldes op til max. 5 kg og er udelukkende beregnet til transport af varer!
6. Brug ikke en defekt rollator, og kontakt den autoriserede forhandler, hvis du bemærker væsentlige ændringer eller tegn på kraftig slitage.

Rengøring:

- * Du bør rengøre/desinficere den indendørs rollator med jævne mellemrum (obligatorisk ved brugerskift).
- * Brug en mild sæbe uden slibende tilsætningsstoffer og en blød klud til at rengøre den indendørs rollator.
- * Brug ikke slibende eller ætsende rengøringsmidler eller en højtryks-damprenser!
- * Sørg for, at der ikke opsamles snavs på dæk eller bremses. Dette kan fjernes med en blød børste og varmt vand.
- * Tør den indendørs rollator efter rengøring. Tør også din indendørs rollator efter hvis du for eksempel har været i et regnvejr.

Tekniske data:

Total dybde (åben): 65.5cm

Total bredde (åben): 60 cm

Total højde minimum: 89 cm

Total højde maximum: 93.5cm

Max. Brugervægt: 100kg

Max. Vægtindhold I kurvetasken: 5kg

Totalvægt for indendørsrollatoren: 5,15kg

| | | |
|---|----|----|
| REF C1315 | CE | MD |
|  RSM23120001 | | |
|  2023-12 | | |
| Max. weight:100kg | | |
|  Raise Medical Industries, Inc. Phase I, Nanhai Industrial Village, Jiangli North Road, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City,Guangdong Province, China | | |
|  SUNGO Europe B.V. Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands | | |
| UDI-DI: (01)06975831922095 | | |
| Basic UDI-DI: 697583192ROLLATOR0015H | | |

Garanti: 24 mdr. Garantien er ikke gyldig hvis indendørsrollatoren er brugt forkert. Garantien dækker ikke sliddele der bruges under normal brug.

Ved spørgsmål, kontakt forhandler:

SeniorSam A/S

Sundbyvej 19

DK-7752 Snedsted

info@seniorsam.dkwww.seniorsam.dk