


AIR 1

AIR 2

Kørestole - brugervejledning

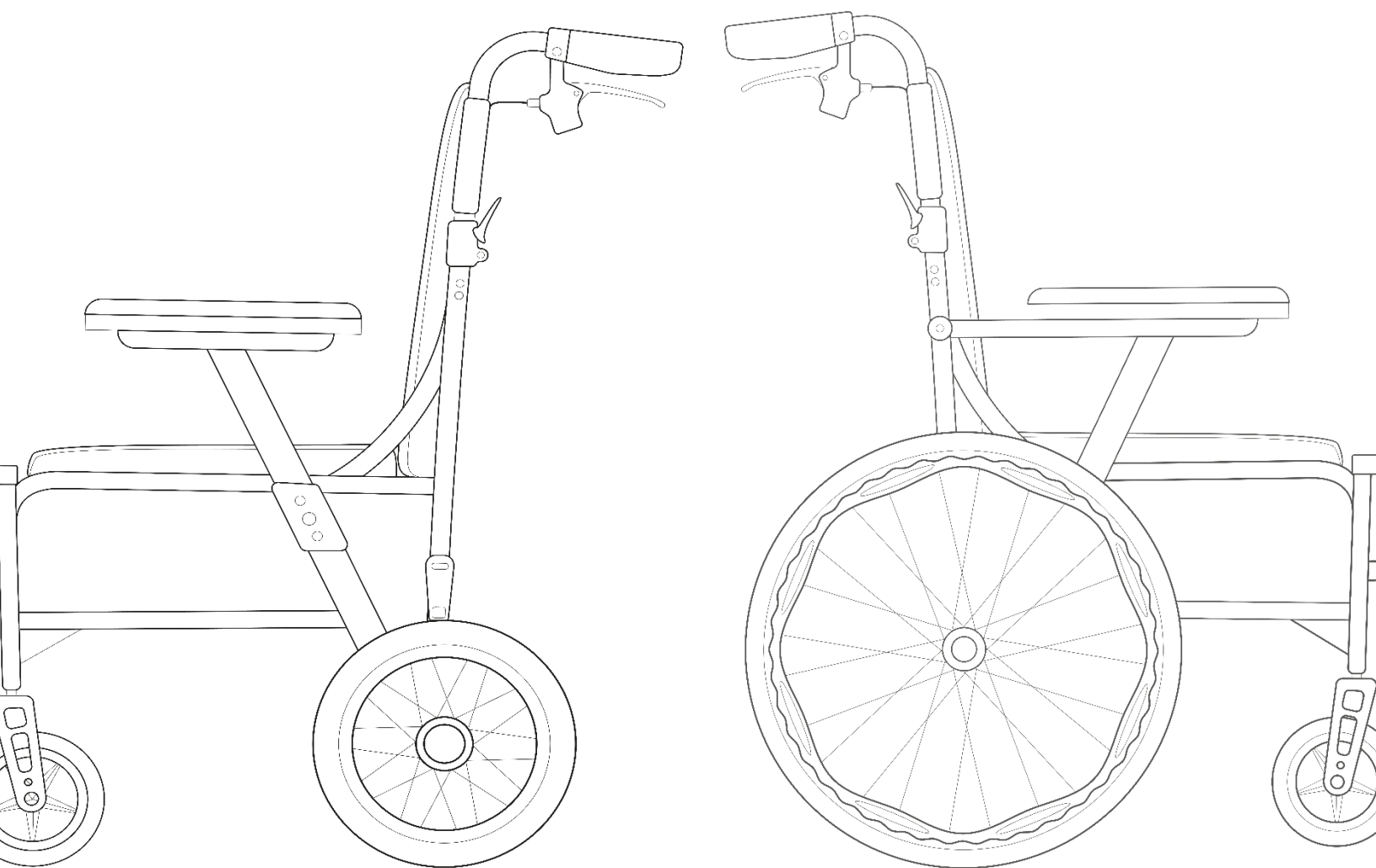

1. Introduktion

Tak og tillykke med købet af din nye AIR 1 eller AIR 2 Magnelite kørestol.

Din nye kørestol er designet til at yde transport indendørs og udendørs for en person, hvis funktionsevne til at gå er nedsat.

Vi er stolte af at kunne levere en sikker og komfortabel høj kvalitets kørestol, og vores mål er at sikre din fulde tilfredshed. Vi håber inderligt at du nyder din AIR 1 eller AIR 2 kørestol.

Læs og overhold alle advarsler og instruktioner i denne brugervejledning, før du betjener de forskellige funktioner på din kørestol, og gem venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte SeniorSam A/S.

2. Lær din kørestol at kende



3. Vigtigt

Sikkerhedsoplysninger

- Før du betjener din kørestol, bedes du læse og forstå alle de oplysninger, der er opgivet for din sikkerhed. Som med enhver kørestol, skal du kun køre dig selv med fuld opmærksomhed for at sikre sikkerheden. Overhold venligst nedenstående advarsler, for at undgå skader eller

kvæstelser som følge af forkert brug af din kørestol. Du er ansvarlig for at tage de rigtige sikkerhedsforanstaltninger før og under brug, og vi vil ikke blive holdt ansvarlige for personskade og/eller produktskade, der skyldes forkert brug af kørestolen. Kontakt venligst din læge rutinemæssigt for at sikre, at der ikke er helbreds-mæssige eller fysiske forhold, der kan begrænse eller forringe din evne til at betjene din kørestol sikkert.

- Kontakt din læge, hvis du tager receptpligtig eller håndkøbsmedicin for at se, om nogen bivirkninger kan begrænse eller forringe din evne til sikkert at betjene din kørestol.
- Betjen ikke din kørestol, mens du er påvirket af alkohol, da dette kan forringe din evne til at betjene den sikkert.
- Brug ikke kørestolen til andet end dets oprindelige formål. Undgå enhver brug, såsom vægttræning, sport, atletik, slæbning, flytning eller bugsering af noget, der kan føre til sikkerhedsrisici og unødigt belastning af kørestolen.
- Din kørestol er kun designet til én person. Medbring ikke passagerer.
- Vi anbefaler kraftigt, at du ikke ryger cigaretter, mens du sidder i din kørestol. Du skal overholde følgende sikkerhedsretningslinjer, hvis du beslutter dig for at ryge cigaretter, mens du sidder i din kørestol: Efterlad ikke tændte cigaretter uden opsyn. Hold askebægre på sikker afstand fra sædebetræk. Sørg altid for, at cigaretter er helt slukkede, før de bortskaffes.
- Vær opmærksom på, at vask af polstrede genstande kan reducere stoffets brandmodstandsdygtighed.
- Udskift slidt eller beskadiget polstring med det samme for at reducere risikoen for antændelighed.
- Modifier ikke din kørestol. For eventuelt tilbehør, kontakt venligst et godkendt firma for installation.
- Tilføjelse af tilbehør til din kørestol kan ændre visse specifikationer, såsom totalvægt, størrelse og/eller tyngdepunkt. Vær venligst opmærksom på, hvordan nogle af ændringerne kan beskadige genstande omkring dig.
- For at forhindre, at kørestolen ruller ukontrolleret af sig selv, skal du låse bremserne på enhver skråning eller stigning.
- Hold dig selv, tøj og alle andre genstande væk fra hjulene, mens du bevæger dig. Lad ikke genstande slæbe bag kørestolen, når du bevæger dig. Løstsiddende tøj eller andre genstande kan blive fanget i hjulene.

4. Sikker montering og afmontering

For sikkert at montere og afmontere din kørestol, skal du altid sørge for, at bremserne er låst, hvis du undlader at gøre det, kan den bevæge dig uventet. Flyt din kørestol så tæt som du kan på det sæde, du forflytter dig fra. Fold op eller fjern fodplader og flyt så langt tilbage på sædet som muligt, dette vil mindske risikoen for at falde af sædet.

Den fulde korrekte overførselsmetode varierer baseret på dine personlige forhold, så arbejd med din sundhedspersonale for at lære, hvordan du placerer din krop, og hvordan du støtter dig selv under en forflytning.

Vi råder dig også til, at du får nogen til at hjælpe dig, indtil du er sikker på, at du sikkert kan flytte dig på egen hånd.

5. Bevæg dig sikkert

- Overhold altid alle de lokale fodgænger- og færdselsregler. Det kan være svært for andre, at se dig, når du sidder på din kørestol. Vent, indtil din vej er fri af trafik, og fortsæt derefter med stor forsigtighed. Brug af sikkerhedsudstyr såsom reflekser/refleksbeklædning, lys og sikkerhedsflag er rådgivende.
- Hver kørestol er forskellig. Tag dig tid til at lære følelsen af denne kørestol at kende, før du betjener den.
- Lær de områder at kende, hvor du planlægger at bruge kørestol. Se efter farer og lær, hvordan du undgår dem.
- For at forhindre væltning skal du reducere din hastighed, når du drejer, og foretag ikke skarpe sving. Oprethold altid et stabilt tyngdepunkt, mens du drejer, og undgå at flytte din vægt i den modsatte retning af et sving.
- Kør ikke op eller ned af potentielt farlige overflader og/eller skråninger, inklusive, men ikke begrænset til områder dækket af sne, is, afklippet græs eller våde blade.
- Undgå enhver ændring af position eller bevægelse, der kan ændre dit tyngdepunkt, mens kørestolen er i bevægelse.

Når du betjener din kørestol, skal du altid være opmærksom på følgende:

Døråbninger og dørtrin.

Brug aldrig siderne af en døråbning til at trække dig igennem. Den sikreste måde er at køre op ad døren med begge hænder på fælgene, og sikre, at du har rigelig plads på hver side og derefter fortsætte frem.

Læner sig

Læn dig ikke over siden af din kørestol. Vær altid forsigtig, når du læner dig bagud, og sørg for, at du har fuld kontrol, hvis du nogensinde tipper din kørestol bagud.

Hældninger

Drej aldrig på en skråning for at undgå at vælte. Undgå at stoppe på en skråning. Overskrid ikke kørestolens maksimale sikre hældning.

Kantsten

Få så vidt muligt hjælp fra en ledsager ved forcering af kantsten. Undgå hårde stød ved nedadgående kantsten.

Trappe

Brug altid to eller flere assistenter til denne øvelse. Vip kørestolen til balancepunktet. En assistent (bagfra) holder kørestolen mod det første trin og løfter sikkert op. Den anden assistent (foran) løfter sig fra en fast del af rammen til over trappehøjden og holder den, mens den første assistent bevæger sig et trin op. Gentag et trin ad gangen, indtil begge assistenter sikkert når toppen af trappen.

6. Sikker transport

Når du transporterer din kørestol, skal du altid være opmærksom på følgende:

- Brug ikke din kørestol som sæde i et motorkøretøj.
- Fastgør altid kørestolen, når den transporteres.
- Transporter aldrig kørestolen på forsædet af et køretøj, da det kan bevæge sig og distrahere føreren.
- Sid aldrig på din kørestol, mens den er i et kørende køretøj.
- Træk ikke din kørestol med en bil. Bugsering kan overskride den maksimale hastighedstærskel, hvilket resulterer i beskadigelse af kritiske komponenter i kørestolen.

7. Foldning og udfoldning af kørestolen

Udfoldning

1. Stil dig bag din kørestol.
2. Tryk håndtaget til tilbagefoldning/udfoldning indad, og løft ledsagerhåndtaget op ad gangen.
3. Hold armlænene, træk udad.
4. Peg med fingrene indad med håndfladen på stellet, skub ned, indtil sædet er helt sænket. Sørg for, at rammen sidder godt fast i holderen.
5. Vip fodpladerne ned.

Folding

1. Sving fodpladerne op
2. Ved hjælp af lærredshåndtagene løftes hver side af sædet opad
3. Tryk håndtaget til tilbagefoldning/udfoldning indad, og skub ledsagerhåndtaget ned en af ad gangen.
4. Foldningen er nu afsluttet.

8. Sikkerhedssele montering og justering

Denne kørestol er ikke udstyret med sikkerhedssele.

9. Daglige kontroller

Kontroller følgende punkter, før du bruger din kørestol. Hvis du finder noget unormalt, eller som du er usikker på, kontakt det firma du har købt kørestolen hos, for yderligere rådgivning eller inspektion, før du bruger din kørestol.

Hjul

- Sikrer dig, at der ikke er revner eller andre skader på hjulene.
- Sikrer dig, at hjulene ikke slingrer eller roterer.
- Sikrer dig, at der ikke sidder fremmede objekter i hjulene.
- Sikrer dig, at der ikke forekommer ekstra stort slid på dækkene.
- Sikrer dig, at der ikke forekommer lyde fra kørestolen.

Sæde

- Sikrer dig, at der ikke er usædvanlige bevægelser.
- Sikrer dig, at polstringen ikke er slidt.

Bremser

- Sikrer dig at bremsene stopper kørestolen når den er låst.
- Sikrer dig at bremsehåndtagene bevæger sig uden forhindringer, og aktiver bremsene når de trækkes.

10. Rengøring, vedligeholdelse og bortskaffelse

Rengøring

For at rengøre din kørestol skal du bruge en blød børste til at fjerne snavs eller støv, og bruge en fugtig klud og et blødt rengøringsmiddel til at tørre alle overflader af. Lad din kørestol tørre naturligt.

- Brug ikke en slange, højtryksrenser eller sprøjt ikke vand direkte på din kørestol.
- Brug ikke slibende eller skurende rengøringsmidler eller væsker til rengøring.

Vedligeholdelse

Sørg for, at den daglige kontrol udføres på din kørestol. Udover rengøring og daglige eftersyn anbefales det, at al vedligeholdelse udføres af et godkendt firma.

Bortskaffelse

Det anbefales, at din kørestol bortskaffes gennem et godkendt firma. For mere information og kontakt det firma, du har købt hos.

11. Garanti

Alle Motion Healthcare produkter sælges til vores partnere med garanti, de vil til gengæld sælge produktet til dig med garanti, det er to separate aftaler.

For at finde ud af specifikke detaljer om den garanti, du modtager, eller for at fremsætte krav, bedes du kontakte det firma, du har købt hos.



Suzhou Master Co Ltd
48 Binjiang Road
Zhangpu Town, Kunshan
Jiangsu, China



Riomavix S.L
Calle de Almansa 55
1D Madrid 28039
Spain



SeniorSam A/S
Sundbyvej 19
7752 Snedsted
Danmark
info@seniorsam.dk
DK33082037

12. Specifikationer

	Air 2	Air 1
Totalvægt	11,45kg	9,5kg
Tungeste del	6,5kg	6,2kg
Max brugervægt	125kg	125kg
Bredde	61,8cm	61cm
Længde med fodstøtter	107cm	107cm
Højde	97cm	91cm
Foldet sammen	32cm	26cm
Foldet længde	107cm	107cm
Højde uden hjul	68cm	72cm
Sædebredde	44,5cm	45cm
Sædedybde	45,5cm	42cm
Sædehøjde	41cm	50cm
Forhjul	15,2cm	15,2cm
Baghjul	55,8cm	30,4cm
Håndfæste diameter	51,2cm	Ingen
Armstøtte til sædehøjde	38cm	16cm

