


Magnesium kørestol fra actiumplus a/s
Model M303D. Varenr ac340 + ac341
Vægt kun 9,6kg (uden fodstøtter)

Brugsanvisning

actiumplus⁺

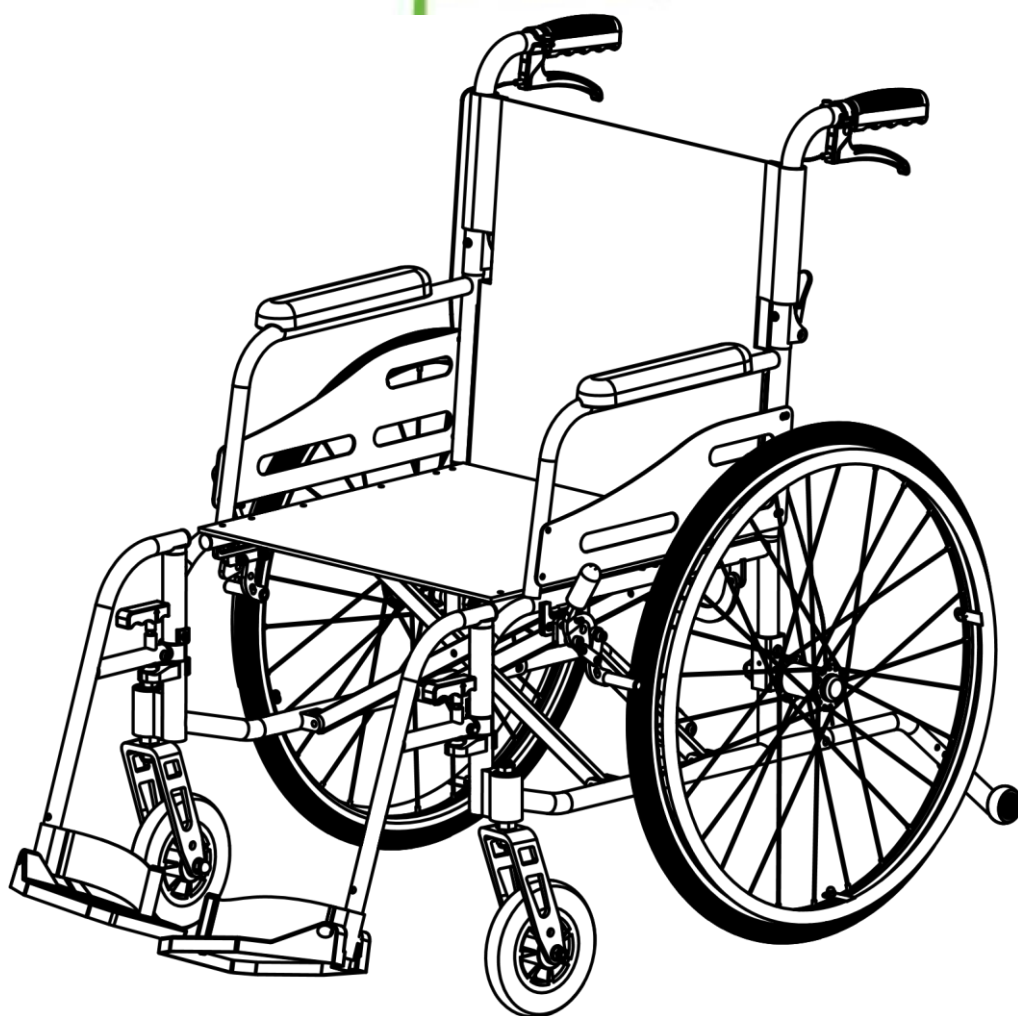

VIGTIG: Læs indholdet af brugsanvisningen før brug

Sikkerhedsretningslinjer



ADVARSEL! Kørestolen skal som hovedregel samles af en autoriseret leverandør eller kvalificeret tekniker. Vedkommende skal gennemgå alle procedure i denne manual.

Symbolerne nedenfor bruges gennem brugsanvisningen og på kørestolen til at identificere advarsler og vigtig information. Det er vigtigt at du læser dem godt igennem.



ADVARSEL! Indikerer en potentiel farlig tilstand/situation. Overholdes de anviste producerer ikke, kan det medføre personskaade, skade på komponenter eller funktionsfejl. Advarsels symbolet vises som en gul trekant med sort kant og et sort udråbstegn indvendig.



PÅBUD! Disse handlinger skal udføres som anført. Overholdes de påbudte handlinger ikke, kan det medføre personskaade og/eller materiale skade. Symbolet for påbudte handlinger vises som en blå cirkel med en hvid kant og en hvid firkant indvendig.



FORBUDT! Disse handlinger er forbudte. Disse handlinger bør under ingen omstændigheder udføres. Udføres en forbudt handling, kan det medføre personskaade og/eller materiel skade. Symbolet for denne handling er en rød cirkel med en sort streg igennem.

Henvendelse ved information

Forhandler: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Købsdato: _____

BEMÆRK: Brugsanvisningen er udført af de senest tilgængelig specifikationer og produktinformationer på udgivelses tidspunktet. Vi forbeholder os retten til at udføre ændringer, hvis det findes nødvendigt. Ændringer i produktet kan give en smule variation mellem illustrationerne og forklaringerne i manualen og det produkt du har købt.



Rev A/Maj 2015

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsretningslinjer	2
Indholdsfortegnelse	2
I. Introduktion.....	4
II. Sikkerhed	5
III. Kørestolen.....	12
IV. Anvendelse	15
V. Behandling og vedligeholdelse.....	18
VI. Garanti.....	20
B I L A G – S P E C I F I K A T I O N E R	22

I. Introduktion

SIKKERHED

VELKOMMEN til din nye magnesium kørestol fra actiumplus a/s. Kørestolen du har købt, kombinerer avancerede komponenter med sikkerhed, komfort og design. Vi er overbevist om, at disse funktioner vil give dig den komfort du forventer gennem dine daglige aktiviteter. Når du har sat dig ind i, hvordan du sikkert bruger og vedligeholder din kørestol, vil den kunne bruges problemfrit i mange år.

Læs og forstå alle instruktioner, advarsler og bemærkninger i denne brugsanvisning, før du anvender din kørestol for første gang. Husk også at læse alle instruktioner, advarsler og bemærkninger som måtte være i enhver ekstra brochure som medfølger til kørestolen før brug. Din sikkerhed afhænger af at du selv, såvel din forhandler, opsynsmand eller professionelt plejepersonale udviser ordentlig dømmekraft.

Hvis der er informationer i brugsanvisningen som du ikke forstår, eller hvis du har brug for ekstra hjælp til opsætning og brug, bedes du venligst kontakte din autoriserede forhandler. Overholdes instruktionerne fra manualen og selve kørestolen ikke, kan det medføre personskaade og/eller skader på kørestolen, således garantien frafalder.

FORHANDLERAFTALE

Ved modtagelse af dette produkt, lover du, at du ikke vil ændre på produktet, eller fjerne, uanvendeliggøre og uforsvarliggøre nogen former for afskærmninger, skærme og andre funktioner på produktet; at du ikke vil afslå eller forsømme, at montere eftermonteringsgrej fra tid til anden fra producenten, for at forbedre eller bevare sikkerheden ved brug af dette produkt.

FORSENDELSE OG LEVERING

Før du tager kørestolen i brug, skal du sikre dig, at din levering er fuldendt, da nogle komponenter kan være pakket individuelt. Kontakt straks din forhandler, hvis du ikke har modtaget hele din levering. Hvis der er opstået skader på emballage eller indhold under transport, skal du kontakte det ansvarlige leveringsfirma.

BEMÆRK: Hvis du på noget tidspunkt mister dit produktregistrerings kort eller din kopi af denne brugsanvisning, kan du blot kontakte os og vi sender en ny med det samme.

II. Sikkerhed

PRODUKTETS SIKKERHEDSSYMBOLER

Symbolerne nedenfor er brugt på kørestolen til at identificere advarsler, påbudte handlinger og forbudte handlinger. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår dem fuldstændig.



Læs og følg informationen i



brugsanvisningen Maksimal



brugervægt.



Hold hænderne væk fra hjulene under brug. Vær opmærksom på, at løst tøj kan sætte sig fast i hjulene under brug.



Undgå at udsætte kørestolen for regn, sne, is, salt eller vandpytter, når det er muligt. Vedligehold og opbevar i rene og tørre omgivelser.

Bortskaffelse og genanvendelse – kontakt din autoriserede forhandler for information om korrekt bortskaffelse og genanvendelse af dit produkt og dets emballage.

GENERELLE RETNINGSLINJER



PÅBUD! Brug ikke kørestolen for første gang før du har læst og forstået brugsanvisningen grundigt.

Din kørestol er den nyeste livs-videreudvikling anordning designet til at forbedre mobilitet. Producenten tilbyder en omfattende række af produkter for at tilpasse sig bedst muligt til de individuelle behov fra kørestolsbrugere. Vær opmærksom på, at det endelige valg og købsbeslutning om hvilken type kørestol som skal bruges, skal træffes af den ansvarshavende kørestolsbruger, som er i stand til at tage sådan en beslutning, og vedkommendes sundhedspersonale (fx læge, fysioterapeut).

Indholdet af denne brugsanvisning er udformet med forventningen om, at en kørestolsekspert har tilpasset kørestolen korrekt til brugeren, og har hjulpet det ordinerede sundhedspersonale og/eller den autoriserede forhandler i instruktionsprocessen af dette produkt.

Der er visse situationer, herunder nogle medicinske tilstande, hvor kørestolsbrugeren er nødt til at øve sig i at bruge kørestolen med tilstedeværelse af en faglært ledsager. En faglært ledsager kan være et familiemedlem eller sundhedspersonale, som er specielt uddannet til at hjælpe en kørestolsbruger med forskellige daglige aktiviteter.

Når du begynder at bruge din kørestol til dine daglige aktiviteter, vil du sikkert støde på situationer, hvori du vil have brug for øvelse. Tag den tid det kræver, og du vil snart være i fuld kontrol, når du manøvrer gennem døråbninger, ind og ud af elevatorer, op og ned af ramper og over moderat terræn.

Nedenfor er nogle sikkerhedsforanstaltninger, tips og andre sikkerhedsovervejelser, som vil hjælpe dig med at blive vant til at bruge din kørestol sikkert.

Ændringer

Producenten har designet og konstrueret din kørestol til at yde maksimal mobilitet og anvendelighed. Et bredt udvalg af tilbehør er tilgængeligt hos din autoriserede forhandler, for at tilpasse din kørestol bedre til dine behov og/eller præferencer. Du bør under ingen omstændigheder ændre, tilføje, fjerne eller deaktivere nogle detaljer, dele eller funktioner af din kørestol.



ADVARSEL! Du må ikke ændre din kørestol på nogen måde som ikke er godkendt af producenten. Brug ikke tilbehør hvis det ikke er testet og godkendt til produktet.

Før-brugs sikkerhedstjek

Lær at kende din kørestol og dens evner. Producenten anbefaler, at du udfører et sikkerhedstjek før hvert brug, for at sikre, at din kørestol fungerer fejlfrit og sikkert. Du bør før brug blive trænet i at bruge kørestolen sikkert af din autoriserede forhandler.

Udfør følgende eftersyn før brug af kørestolen:

- Kontroller bremserne. Se afsnit V. "Vedligeholdelse."

BEMÆRK: Hvis du opdager et problem skal du kontakte din autoriserede forhandler for hjælp.

Vægt begrænsninger

Din kørestol har en maksimal vægtkapacitet. Gå til specifikations tabellen for at se denne grænse. Vær opmærksom på at vægtkapaciteten er den samlede vægt af bruger og alt tilbehør monteret på kørestolen.



PÅBUD! Overhold vægtgrænserne på din kørestol. Overstiges vægtgrænserne frafalder din garanti. Producenten vil ikke blive holdt ansvarlig for skader og/eller ejendomsskade som følge af overskridelse af vægtgrænsen.

ADVARSEL! Medbring ikke passagerer på din kørestol. Passagerer kan påvirke tyngdepunktet og få kørestolen til tippe eller vælte.



ADVARSEL! Bagside lommen er til småting såsom mobiltelefon, nøgler og papir. Der er ikke andre opbevaringsområder på din kørestol.

ADVARSEL! Medbring ikke baggage som vejer mere end 4,5 kg. bag på kørestolen. Medbragt baggage bag på kørestolen som overstiger 4,5 kg. kan påvirke tyngdepunktet og få kørestolen til at tippe eller vælte.

Rampe information

Flere og flere bygninger har ramper med specialdesignede hældninger for nem og sikker adgang. Nogle ramper kan have 180 grader sving, som kræver at du har gode svingningsevner på din kørestol.

- Fortsæt med stor forsigtighed når du nærmer dig en nedadgående rampe eller andre hældninger.
- Tag brede sving med din kørestols forhjul omkring alle skarpe hjørner. Hvis du gør det vil kørestolens hovedhjul følge med i en bred bue uden at komme for tæt på hjørnet, køre ind i det eller komme til at sidde fast i nogle rækværks kanter.
- Kør langsomt ned ad en rampe så du opnår en sikker og kontrolleret nedstigning. ■ Undgå pludselige start og stop.

Ved opkørsel af en hældning skal det forsøges gjort uden stop. Hvis det er nødvendigt at stoppe, skal du starte langsomt op og derefter forsigtigt øge farten. Ved nedadkørsel på en hældning skal der køres forsigtigt og kun i fremadgående retning. Hvis din kørestol begynder at kører hurtigere ned af hældningen end forudset eller ønsket, skal du stoppe den helt ved brug af begge hænder, og derefter fortsætte roligt nedad for at garantere en sikker og kontrolleret nedgang.



ADVARSEL! Når du er på en hældning, må du aldrig lade kørestolen rulle ukontrolleret og frit nedad, mens du sidder i den eller står ved siden af den.

ADVARSEL! Ved opadgående hældning må du ikke køre zigzag eller køre vippe kørestolen i en vinkel mod hældningen. Kør din kørestol lige op ad hældningen. Dette reducere risikoen for at tippe eller vælte. Udvis



altid ekstrem forsigtighed når du navigerer på en hældning.

ADVARSEL! Du bør ikke køre op eller ned af en potential farlig hældning (fx områder dækket af sne, is, afslået græs eller våde blade).

ADVARSEL! Kør aldrig baglæns ned ad en hældning. Dette kan få kørestolen til at vælte. Udvis altid ekstrem forsigtighed når du passere en hældning.




ADVARSEL! Hvis din kørestol er udstyret med en taske monteret til ryglænet, må denne ikke overbelastes eller overstige den maksimale vægtgrænse for tasken. Dette kan skabe ustabilitet på din kørestol, når du navigerer på hældninger og få den til at vælte.

ADVARSEL! Selvom din kørestol er i stand til at køre på hældninger bedre end i illustration 1, må du under ingen omstændigheder overskride retningslinjerne eller andre specifikationer som er beskrevet i denne manual. Overholdes dette ikke, vil det kunne gøre din kørestol ustabil.

Producenten anbefaler at den maksimale hældningsprocent på en skråning ikke overstiger 8,7 % for at du sikkert kan benytte den med din kørestol. **Se figur 1.**



ADVARSEL! Enhvert forsøg på at køre på en skråning stejlere end 8,7 % kan bringe din kørestol i en ustabil position, og få den til at vælte

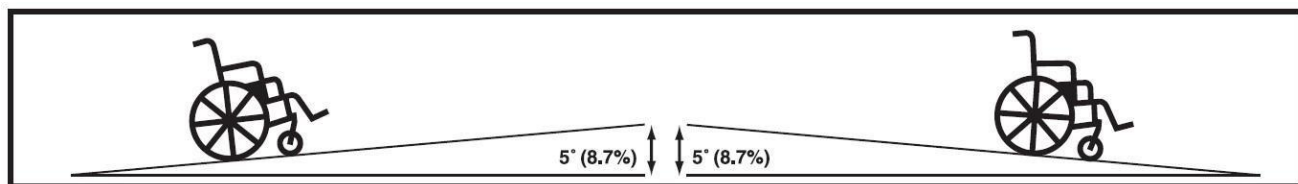

Figur 1. Maksimal sikker skråning (Opadgående og nedadgående)

Bremse information

For at stoppe kørestolen skal du holde fast i begge drivringe indtil kørestolen stopper helt.

Manual parkeringsbremse / håndbremse

Din kørestol er udstyret med to manuelle parkeringsbremses; én monteret på hvert hjul. De manuelle parkeringsbremses hjælper med at forebygge, at din kørestol bevæger sig når den er parkeret. Når din kørestol er bragt til fuld stop, skal du slå begge bremses til. Kontakt din autoriserede forhandler hvis du har spørgsmål til hvordan de manuelle parkeringsbremses anvendes.

BEMÆRK: *Producenten anbefaler at du ikke parkerer på en hældning i længere tid af gangen, da din kørestol risikerer at trille, eller at bremsesne bliver løse efter omfattende brug.*



ADVARSEL! Forsøg ikke på at bruge parkeringsbremsesne til at standse din kørestol med.

Når du svinger:

Selvom din kørestol er udstyret med forhjul, kan overdrevent høj fart i et sving stadig få din kørestol til at vælte. Faktorer som påvirker risikoen for at vælte inkluderer, men er ikke begrænset til: svingningshastighed, styringsvinkel (hvor skarpt du svinger), ujævn vejoverflade, skrående vejoverflader, kørsel i et område med lav friktion til et område med høj friktion (fx kørsel fra et græsområde til et asfalteret område – især i høj fart mens du drejer) og pludselige retningsændringer. Høj fart i sving anbefales ikke. Hvis du føler, at du er ved at vælte i et sving, skal du sænke farten og ændre din styringsvinkel (fx nedsætte skarpheden af svinget) for at forebygge din kørestol vælter.



ADVARSEL! Når du svinger skarpt, skal du sænke farten og opretholde tyngdepunktet. Dette reducerer risikoen for at vælte eller falde af.

Offentlige veje og kørebaner



ADVARSEL! Du bør ikke bruge din kørestol på offentlige veje og kørebaner. Vær opmærksom på at det kan være svært for trafikken at se dig, når du sidder i din kørestol. Følg trafikreglerne for fodgængere. Vent til vejen er fri for trafik og fortsæt derefter med stor forsigtighed.

Udendørs køreoverflader

Din kørestol er designet til at yde optimal stabilitet ved normale køreforhold – tørre overflader af beton, asfaltbeton eller asfalt. Producenten er dog klar over, at der vil være tidspunkter, hvor du vil støde på andre slags overflader. Derfor er din kørestol designet til at præstere beundringsværdigt på fast jord, græs og grus. Du kan bruge din kørestol sikkert på plæner og i parker.

■ Undgå at køre på ujævnt terræn og/eller bløde overflader.

- Undgå højt græs som kan vikle sig ind egerne.
- Undgå løst grus og sand.
- Undgå ujævne overflader.
- Brug ikke din kørestol i fersk- eller saltvand.
- Brug ikke din kørestol ved kanten af et vandløb, sø eller havet.
- Hvis du er usikker på en køre overflade, skal du undgå overfladen.

Barsk vejr sikkerhedsforanstaltninger

Det bør undgås at udsætte din kørestol for barske vejrforhold når det er muligt. Hvis du pludselige bliver fanget i regn, sne, hård kulde eller varme mens du kører i din kørestol, skal du hurtigst muligt finde læ. Tør din kørestol grundigt før opbevaring eller brug.



FORBUD! Kørsel i regn, sne, salt, dug og på is/glatte overflader kan have en uønsket effekt på din kørestol. Opbevar din kørestol tørt og rent.



ADVARSEL! Langvarig udsættelse for varme eller kolde forhold kan påvirke temperaturen på polstrede og ikke-polstrede dele på kørestolen, hvilket kan medføre hudirritation. Udvis forsigtighed når du bruger kørestolen i ekstremt kolde eller varme forhold, eller når du udsætter din kørestol for direkte sollys i længere tid ad gangen.


Forhindringer (Trin, kantsten, mm.)

Fortsæt med ekstrem forsigtighed når du kører i nærheden af hævede overflader, ubeskyttede afsatser og/eller lodrette nedadgange (trin, verandaer, trapper mm). Sørg for at din kørestol kører vinkelret på kantstenen, hvis du bliver nødsaget til at køre ned ad en. **Se figur 2.**



ADVARSEL! Forsøg ikke på at køre op ad en forhindring, som er højere end 5 cm, medmindre du har hjælp fra en ledsager.

ADVARSEL! Forsøg ikke på at køre baglæns ned trin, trappetrin, kantsten eller andre forhindringer. Dette kan få kørestolen til at vælte

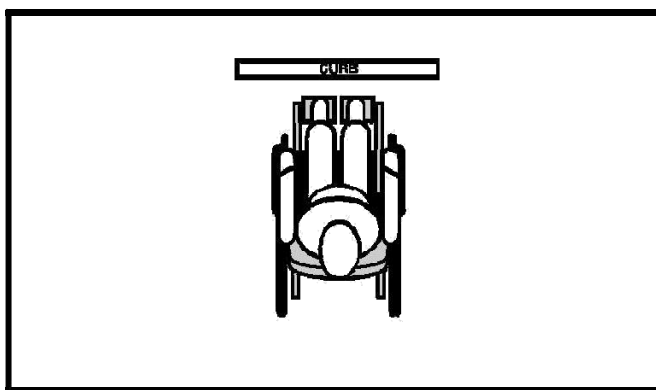

Figur 2. Korrekt fremgangsmåde på trin



Figur 3. Forkert fremgangsmåde på trin

Trapper og rulletrapper

Kørestole er ikke produceret til at køre op eller ned af trapper eller rulletrapper. Brug altid en elevator.



ADVARSEL! Brug aldrig din kørestol på trapper eller rulletrapper.

Døre

- Undersøg om døren åbner mod dig eller væk fra dig.
- Kør din kørestol forsigtigt og langsomt fremad for at skubbe døren op. Eller kør din kørestol forsigtigt og langsomt baglæns for at trække døren op.

Elevatore

Moderne elevatorer har en dørkantssikkerhedsmekanisme, der når den skubbes til, genåbner elevator døren(e)

- Hvis du er i en døråbning af en elevator og døren(e) begynder at lukke, skal du skubbe til dørkanten eller lade dørkanten komme i kontakt med kørestolen, for så vil døren åbne igen.
- Vær påpasselig med at håndtasker, rygsække eller kørestolstilbehør ikke bliver fanget i elevatordøren.

Liftsystemer / Elevationsprodukter

Hvis du skal have din kørestol med på tur, kan det være nødvendigt at anvende et køretøjsmonteret liftsystem eller et elevationsprodukt til hjælp under transport. Producenten anbefaler at du nøje gennemlæser instruktioner, specifikationer og sikkerhedsinformationerne fremsat af liftens producent, før du tager produktet i brug.

ADVARSEL! Ikke alle liftsystemer/elevationsprodukter er klassificeret til brug med en besat mobilitetsenhed.



Producenten anbefaler at du ikke sidder i din kørestol mens den bliver brugt i forbindelse med nogen former for liftsystemer/elevationsprodukter medmindre:

- Produktet er beregnet til personbesat brug af producenten.

- Du er i stand til at gøre det i nøje overensstemmelse med advarslerne, instruktionerne, specifikationerne og sikkerhedsanvisningerne

fremsat af producenten.

Køretøjstransport

Producenten anbefaler, at du ikke bliver siddende i din kørestol under transport i et motorkøretøj. Kørestolen er designet til at kunne foldes sammen og opbevares et sikkert sted, såsom i bagagerummet af en bil, under transport. Derudover bør alle kørestolsdelene, inklusiv armlæn og frontbøjler, fjernes og/eller sikres nøje under kørsel.



ADVARSEL! Sid ikke i din kørestol mens den er i et bevægende køretøj.

Bevægelser i stolen

Du bør aldrig række ud, læne dig fremover eller bukke dig ned mens du kører i din kørestol. Hvis det er absolut nødvendigt, at du rækker ud, læner dig forover eller bukker dig ned, er det vigtigt at du opretholder tyngdepunktet så din kørestol ikke vælter. Producenten anbefaler at kørestolsbrugeren finder ud af hans/hendes personlige begrænsninger og øver i at bukke sig og række ud efter ting med tilstedeværelse af professionelt kvalificeret sundhedspersonale.



ADVARSEL! Hvis du skal nå genstande på gulvet, bør det ikke gøres ved at bøje dig, læne dig forover eller række ned mellem dine knæ, eller række over ryglænet. Sådanne bevægelser kan ændre dit tyngdepunkt og vægtfordeling af kørestolen. Dette kan få kørestolen til at vælte.



ADVARSEL! Hold hænderne væk fra hjulene under kørsel. Vær opmærksom på at løstsiddende tøj kan blive fanget i hjulene.

Receptpligtig medicin/ fysiske begrænsninger

Brugere skal udvise omtanke og sund fornuft ved anvendelse af en kørestol. Dette omfatter bevidsthed om sikkerhedsspørgsmål, når der anvendes receptpligtig- eller håndkøbsmedicin, eller når brugeren har særlige fysiske begrænsninger.



ADVARSEL! Konsulter din læge hvis du anvender ordinerede- eller håndkøbsmedikamenter, eller hvis du har særlige fysiske begrænsninger. Nogle medikamenter og begrænsninger kan forringe din evne til at håndtere din kørestol på en sikker måde.

Alkohol/rygning

Kørestolsbrugeren skal udvise omtanke og sund fornuft ved anvendelse af hans/hendes kørestol. Dette omfatter bevidsthed om sikkerhedsspørgsmål, mens de er under påvirkning af alkohol eller under rygning.



ADVARSEL! Anvend ikke din kørestol mens du er under påvirkning af alkohol, da dette kan forringe din evne til at bruge din kørestol på en sikker måde.

ADVARSEL! Producenten anbefaler stærkt, at du ikke ryger cigaretter mens du sidder i din kørestol, selvom kørestolen har bestået de nødvendige testkrav der er for rygning af cigaretter. Du skal overholde de følgende sikkerhedsanvisninger, hvis du vælger at ryge cigaretter, mens du sidder i din kørestol.


- Efterlad ikke tændte cigaretter uden opsyn.
- Hold askebægre i en sikker afstand fra sædepuden.
- Sørg altid for at cigaretten er fuldstændig slukket før bortskaffelse.



Opmærksomhed

Opmærksomhed på sikkerhed

- Læn dig ikke fremad under kørsel, specielt på trapper og ujævn vej.
- Hold fødderne på fodstøtterne.
- Når du skal op ad trapper, skal personen der skubber kørestolen træde på bom for tiltning, som er monteret bag på kørestolen, holde i håndtagene og presse nedad, for derefter at skubbe kørestolen fremad.

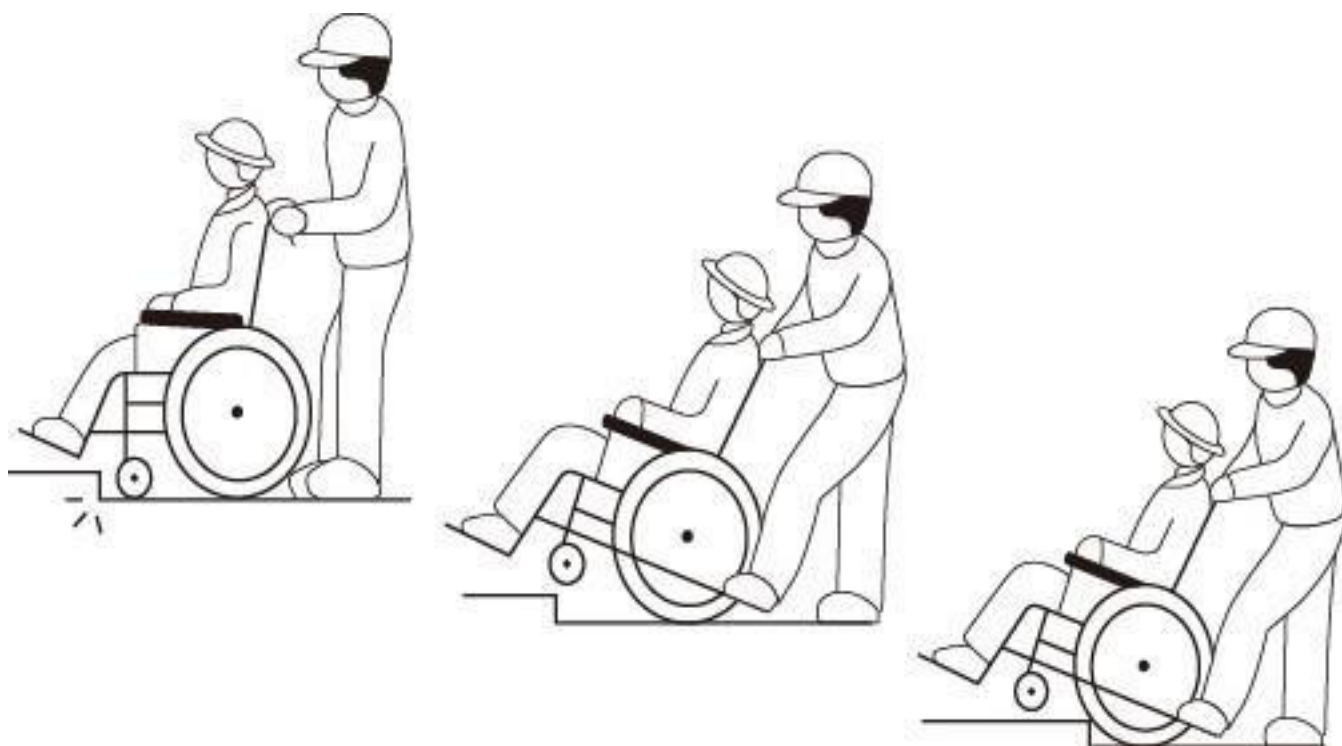


- Kør lige når du passere trinene. Vær forsigtig ikke at køre forhjulet fast mellem trinene, det er farligt.
- Kør retvinklet når du krydser riller og vær opmærksom på, at hjulet ikke sætter sig fast i rillerne.
- Ingen pludselig opbremsning, for at undgå at falde ned.
- Vær forsigtig når du kører og parkerer på rampen.
- Vær opmærksom på biler og fodgængere når du kører om aftenen og på dage med regnvejr.

III. Kørestolen

HM303

Vores kørestol er til indendørsbrug i følge kørestolsstandarder.

HM303 er en baghjuls drevet kørestol, designet til brug både indenfor og udenfor på jævne overflader.

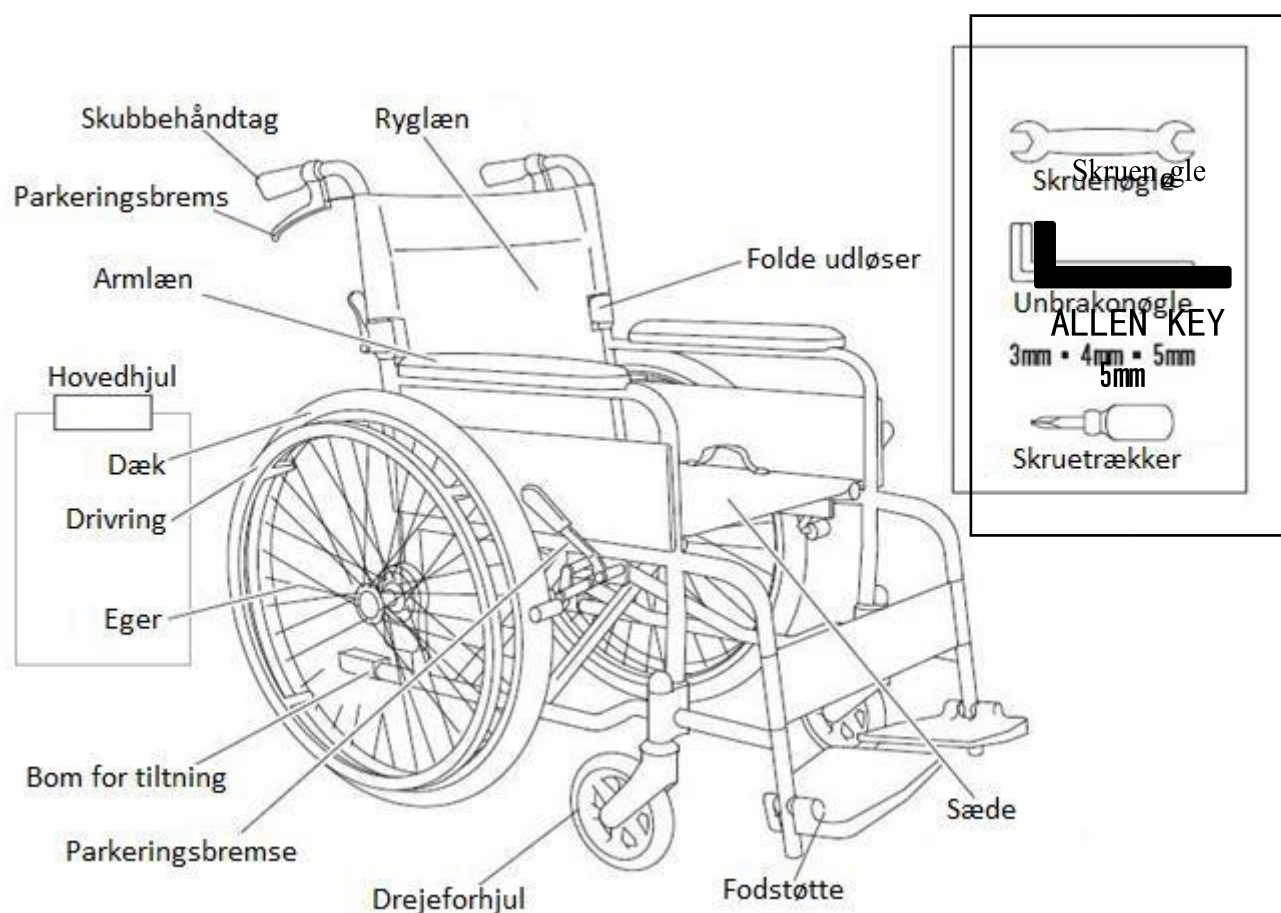

Figur 4. Kørestolen

At folde sædet ud

Løs bremsen, stå i fronten eller bagenden af kørestolen, tag fat i begge armlæn og træk hårdt. For at presse sædet ned, skal du have en hånd på armlænet og den anden bruges til at presse sædet ned. **Se figur 5 og figur 6.**





ADVARSEL! Pas på hænderne.

Sammenfoldning af sædet


Fold først fodstøtterne. Hold så begge ender i sædet, løft sædet op fra midten. Pres begge sider af armlænet mod midten. **Se figur 7.**

Figur 5.

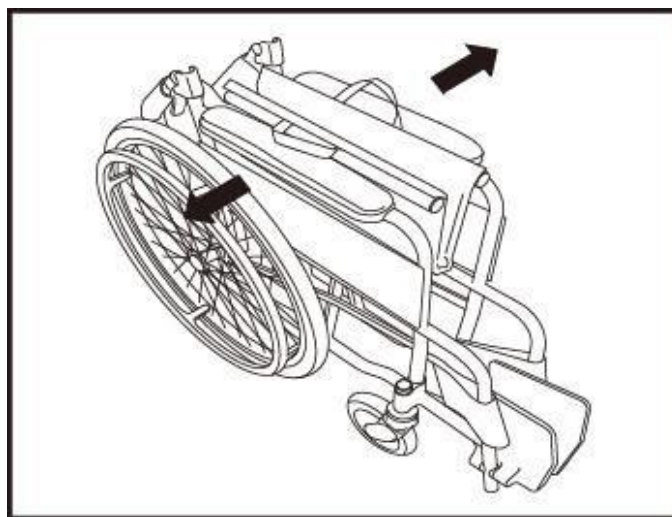

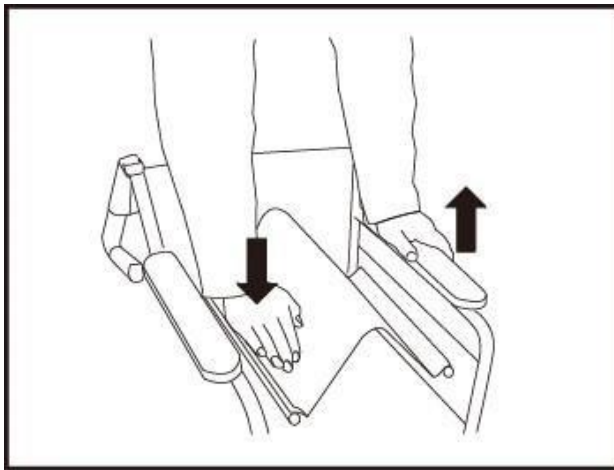


Figur 6.

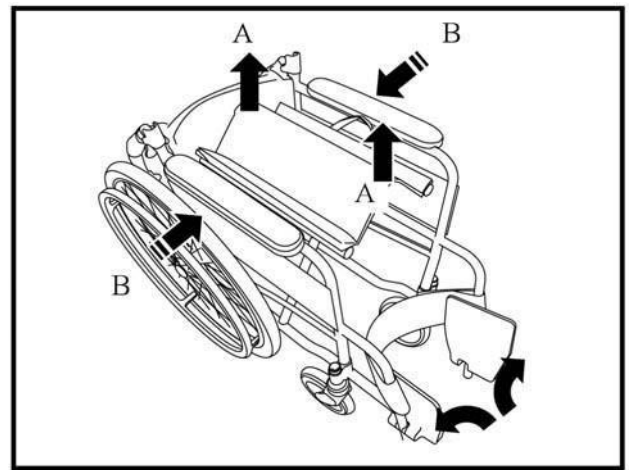

Figur 7.

Montering og fjernelse af benstøtte

Løft grebet opad, som indikeret af den gule pil, og drej det udad. Benstøtten kan nu fjernes. Gør dette omvendt for at samle benstøtten igen. Se figur 8.

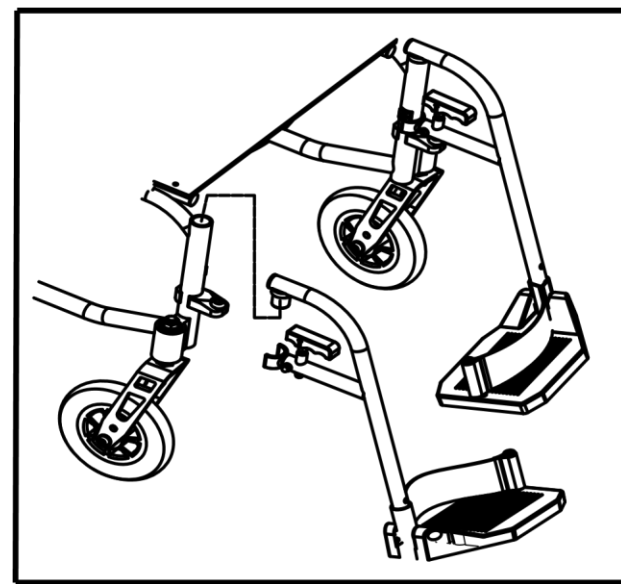

Figur 8.

Åbning af ryglæn

Hold håndtaget og løft op. Se figur 9.



ADVARSEL! Pas på hænderne.




Opmærksomhed


- Hold håndtagene og bevæg op og fremad, bekræft at ryglænet er foldet korrekt
- Pas på hænderne

Sammenfoldning af ryglæn.

Hold i håndtaget med den ene hånd, og brug den anden hånd til at trykke foldningsknappen nede med. Se figur 10.

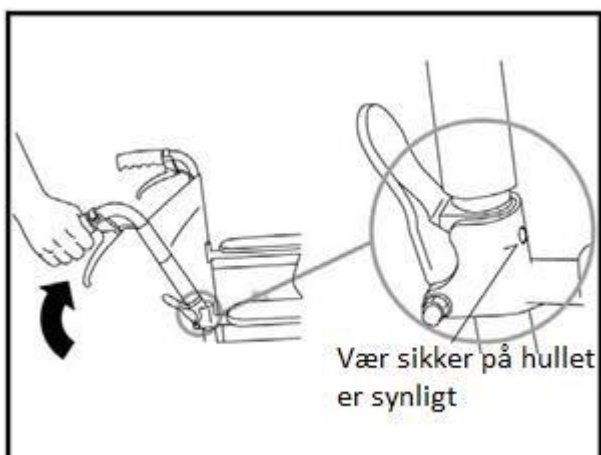

Figur 9.

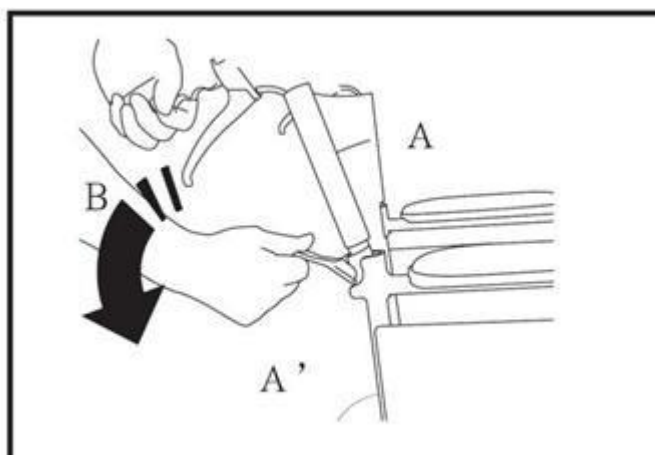


Figur 10.

Ændring af hovedhjuls højde:

1. Fjern hovedhjulet. Tryk på den sorte frigørelses knap, som er placeret i midten af kørehjulet, og træk hjulet af kørestolen. Se figur 11.

Figur 11. Afmontering af hovedhjul

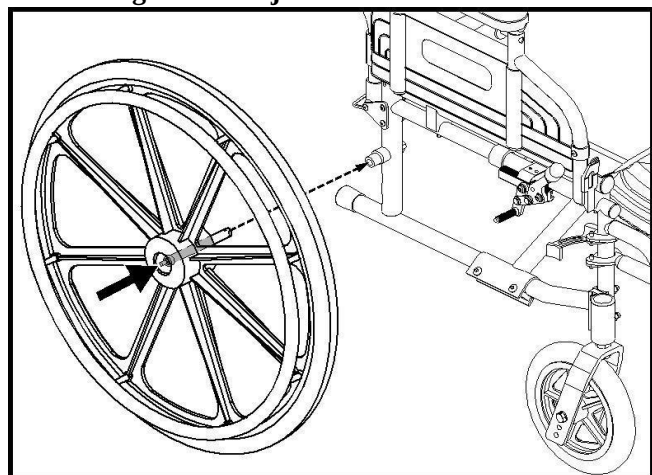

IV. Anvendelse

Kørsel:

Kørsel alene: Bøj hænderne let og begynd nu at rulle med drivringen.


Kørsel med ledsager: hold i begge håndtag og skub kørestolen fremad.

For at slå parkeringsbremsen til:


Hold parkeringsbremsen med begge hænder, mens du sidder i kørestolen. Træk bremsehåndtaget tilbage mod hjulet. For at løsne bremsen, skal bremsen trækkes let den anden vej til ulåst position. Hvis du har en ledsager med, skal vedkommende bremse ved at klemme bremserne i håndtagene sammen, og derefter lette bremsen langsomt den anden vej. Se figur 12.

Bremsning med håndbremse

Stop kørestolen ved at klemme håndbremsene sammen, og løsn kørestolen igen når du slipper håndbremsene. Se figur 13.

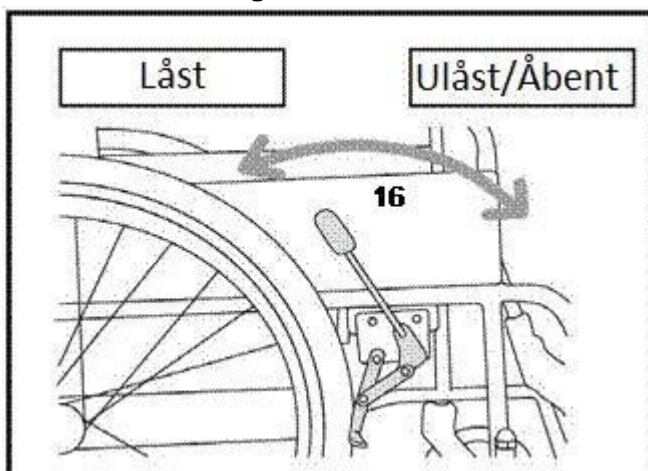


Figur 12.

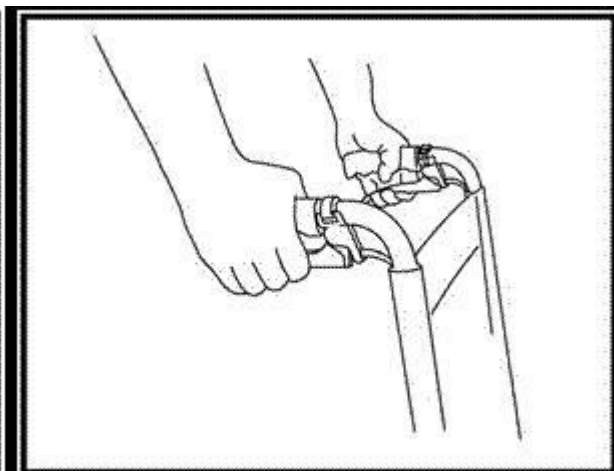

Figur 13

Fodstøtter

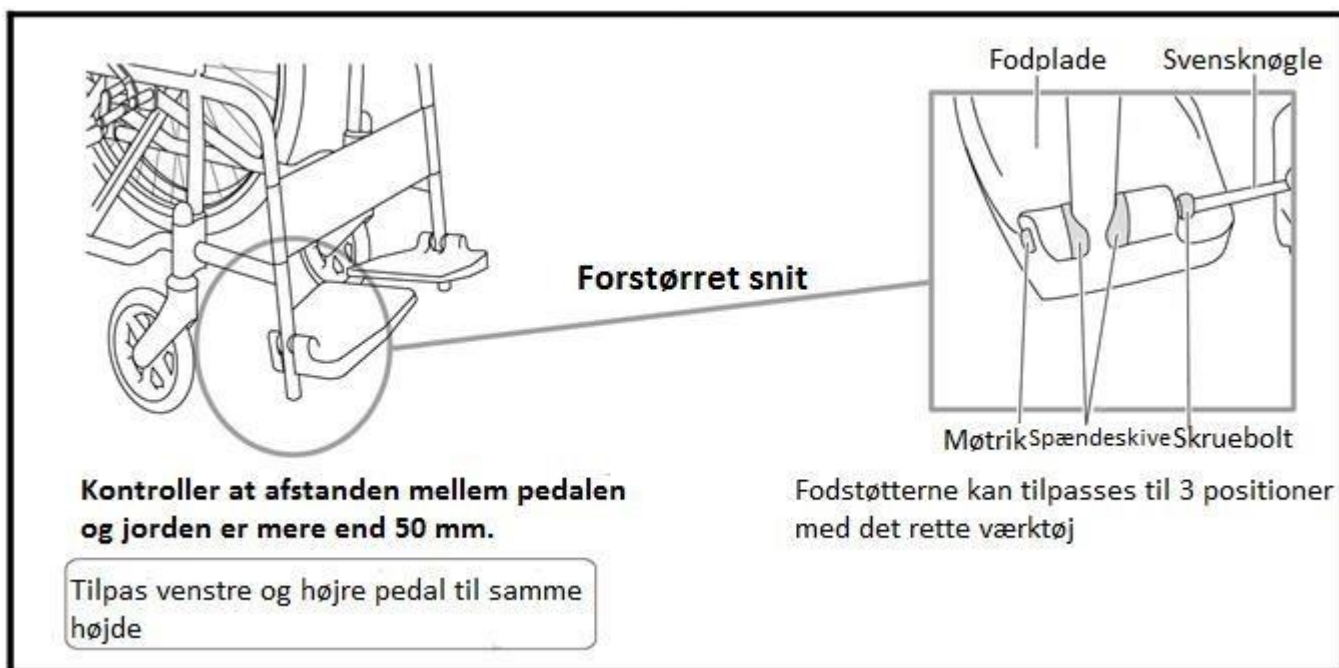

Måder at komme ind og ud af kørestolen

1. Slå parkeringsbremsen til når du sidder i kørestolen, eller skal bevæge dig fra kørestol til seng.
2. Sæt dig korrekt i kørestolen, når du skal ind og ud af den.
3. Stå ikke på fodstøtterne når du skal ind eller ud af kørestolen.


Måder at køre alene på.

- Rul med drivringene og kør på fortovet.




- Forsøg at undgå ujævnhederne i vejen, når du kører på en ujævn vej.

- Stop foran trinnet når du skal køre op ad et trin. Sørg for at forhjulet holder i en ret-vinkel til trinnet, læn dig forover og rul hjulet hårdt. Kør ikke over/op ad trin alene, hvis trinnet er for højt.

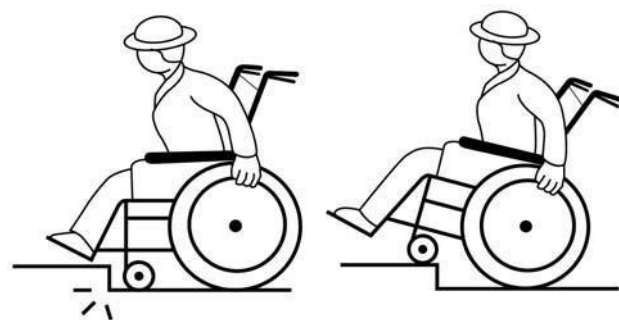

- Læn dig forover når du kører opad. Når du kører nedad, skal du også læne dig forover, mens du ruller hjulet baglæns. Kør ikke opad eller nedad alene, hvis rampen er stejl og lang.

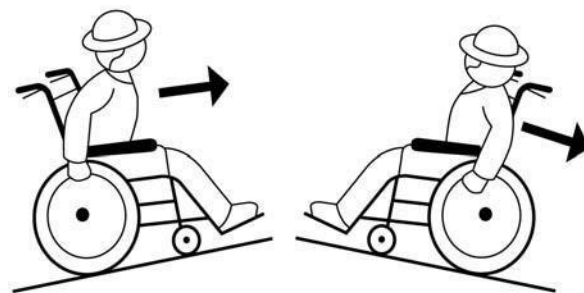

- Kør retvinklet fremad hvis du skal passere riller i vejen. Kør ikke over rillerne alene, hvis de er for brede.



- Kør skråt i stedet for at køre ligeud, når du støder på en vej med pigtrådneth.

Kørsel med ledsager

- Ledsageren skal blot holde i håndtagene og skubbe kørestolen på fortovet.



■ Undgå at hælde kørestolen til den ene side, når der køres på ujævnt fortov. Forsøg at undgå ujævnheder i vejen.

■ Når du skal op ad et trin, skal du stoppe foran trinnet, holde i begge håndtag og presse håndtagene ned, mens du træder på pedalen monteret bag på kørestolen.

■ Ved kørsel opad skal personen som skubber kørestolen læne sig forover, og holde samme position til at gå baglæns, når kørestolen skal køre nedad igen.

■ Kryds rillerne i en ret vinkel.


■ Hvis du støder på en vej med pigtrådnets, skal du køre skråt frem i stedet for ligefrem.

V. Behandling og vedligeholdelse

Din HM303 kørestol kræver rutinemæssige vedligeholdelseskontroller. Du kan selv udføre nogle af kontrollerne mens andre kræver assistance fra din autoriserede forhandler. Forbyggende vedligeholdelse er meget vigtigt. Hvis du følger vedligeholdelses kontrollerne i dette afsnit regelmæssigt, kan du hjælpe med at sikre, at din kørestol giver dig år med problemfri betjening. Hvis du har nogen betænkelighed vedrørende din kørestols behandling eller betjening bedes du kontakte din autoriserede forhandler.



ADVARSEL! Efterse ikke kørestolen, hvis sædet er i brug.

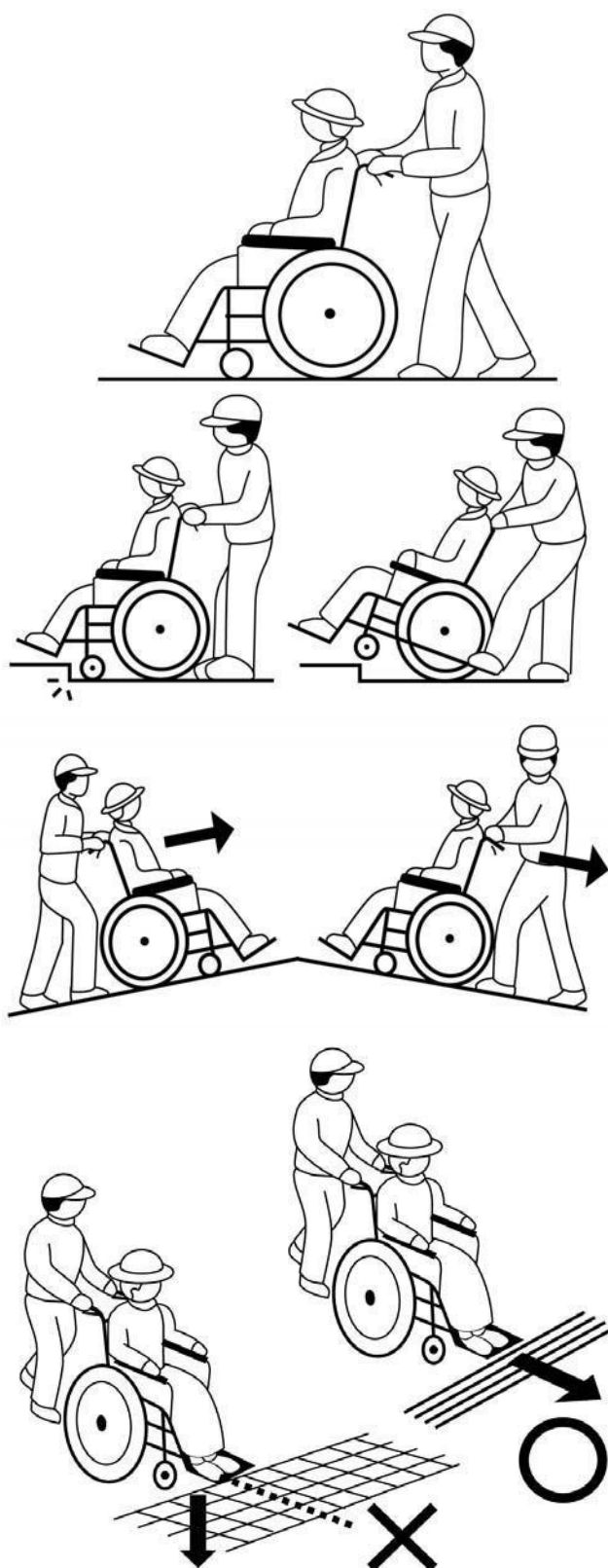

Din kørestol er modtagelig for skader på komponenterne; undgå derfor alle former for fugtige områder.



ADVARSEL! Direkte eller vedvarende eksponering for vand eller damp kan give hjul og stol mekaniske funktionsfejl. Efterse periodisk stolen for tegn på rustangreb forårsaget af eksponering af vand eller kropsvæsker. Vand kan medføre rust på stolens ramme. Kørestolen burde være inkontinens sikker. Beskadigede komponenter bør udskiftes eller behandles omgående.

Skulle din kørestol komme i kontakt med vand:

1. Tør din kørestol så grundig som muligt med et håndklæde.
2. Lad din kørestol stå et varmt, tørt sted i 12 timer, for at få usynlig vand til at fordampe.
3. Hvis du opdager uoverensstemmelser, skal du henvende dig til din autoriserede forhandler med kørestolen. Kørestole som ofte er udsat for forskellige væsker, såsom inkontinens, skal oftere efterses for rustangreb.

Temperaturer

Nogle af din kørestols komponenter er følsomme overfor voldsomme temperaturændringer. Hold altid kørestolen på temperature mellem -8° C og 50° C.

Generelle retningslinjer

- Undgå at udsætte kørestolen for vedvarende eksponering af voldsomme forhold såsom varme, kulde eller fugt.
- Alle hjullejer er for smurt og forseglet. De kræver ingen efterfølgende smøring.

Daglige eftersyn

- Tjek for løse eller manglende skruer, møtrikker og bolte. Udskift eller spænd dem som nødvendigt.
- Tjek hjulene. Se efter ujævn slid, huller eller dæk/fælg adskillelse. Hvis de ser overdrevet slidt ud skal de skiftes.
- Tjek efter afslidte områder på massive hjul. Afslidte områder kan påvirke stabiliteten.
- Sørg for at drivringen er sikkert fæstnet til hjulene.
- Sørg for at den manuelle parkeringsbremse virker korrekt.



ADVARSEL! De manuelle parkeringsbremses er designet til at holde din kørestol stillestående, mens den er parkeret. De er ikke beregnet til at stoppe din kørestol under kørsel. Brug ikke nogle af parkeringsbremsene til at stoppe kørestolen med under kørsel. Dette kan gøre din kørestol ustabil og få den til at vælte.

Månedlige eftersyn

- Tjek efter hjul slid. Kontakt din autoriserede forhandler for reparation.
- Tjek drejeforhjulene for slid. Udskift dem om nødvendigt.
- Tjek forhjulsgaflerne for skader eller rysten, som indikerer, at de kan have behov for justering eller at lejerne skal udskiftes. Kontakt din autoriserede forhandler for reparation.
- Hold din kørestol ren og fri af fremmedmaterialer såsom mudder, skidt, hår, mad, drikke mm.

Årlig eftersyn

Kontakt din autoriserede forhandler for årlig vedligeholdelse, især hvis du bruger din kørestol på daglig basis. Dette hjælper til at sikre, at din kørestol virker korrekt og hjælper til at forebygge fremtidige komplikationer.

Opbevaring

Din kørestol bør opbevares et tørt sted uden voldsomme temperaturer.



ADVARSEL! Hvis du ikke opbevarer den korrekt, kan rammen ruste.

Ved længerevarende opbevaring kan du med fordel placere adskillelige brædder under rammen af din kørestol for at løfte den fra gulvet. Dette fjerner vægten fra hjulene og mindsker risikoen for flade steder på de områder af hjulene som har kontakt til gulvet.

Bortskaffelse af kørestolen

Din kørestol skal bortskaffes efter gældende regler. Kontakt din lokale genbrugsstation eller din autoriserede forhandler for information om korrekt bortskaffelse af kørestol, emballage, ramme komponenter, plastik komponenter, neopren, silikone og polyuretan materialer.

Rengøring og desinficering

Anvend en fugtig klud og et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel til at rengøre plastik- og metaldele af kørestolen. Undgå at anvende produkter som kan ridse overfladen af kørestolen. Hvis det er nødvendigt, kan du rengøre kørestolen med et godkendt desinficeringsmiddel. Sørg for at desinficeringsmidlet ikke skader kørestolen før du anvender det.

ADVARSEL! Følg alle sikkerhedsinstruktioner for korrekt brug af desinficering og/eller rengøringsmiddel før du påfører det på produktet. Overholdes dette ikke kan det medføre hudirritation eller for tidlig forringelse af betræk og/eller kørestolens polering.



ADVARSEL! Du må aldrig spule eller anbringe din kørestol i direkte kontakt med vand. Din kørestol har en lakeret overflade, som nemt tørres af med en fugtig klud.

ADVARSEL! Brug aldrig nogen former for kemikalier til at rengøre et vinylsæde, da det kan forårsage at sædet bliver glat, eller bliver tørt og revner. Brug sæbevand og tør sædet grundigt.

Hjuludskiftning

Hvis din kørestol er udstyret med et massivt dækindlæg er du nødt til at udskifte hele hjulsamlingen.



ADVARSEL! Hjulene på din kørestol bør kun blive eftersat eller skiftet af en autoriseret forhandler eller en kvalificeret tekniker.

VI. Garanti

Producenten garanterer at dette produkt er fri for fejl i materiale og udførelse i 2 år efter køb, når det anvendes af køberen under normale forhold, og så længe det er det samme som fremstillet og ikke er ændret på.

Garantien gælder ikke såfremt fejlen skyldes:

- Ulykker, forsømmelse, misbrug, ukorrekt transport arrangeret af køberen eller købers fagkyndige, eller anden brug end almindelig brug i strid med brugsanvisningen.
- Hvis en anden person end fabrikantens autoriserede personale skal ændre, justere eller reparere produktet, eller udføre nogen form for service på det.
- Der er foretaget uautoriserede ændringer og modifikationer af kørestolen.

Det underforstås, at køberen påtager sig det fulde ansvar for den totale sikkerhedsbrug i det miljø, som produktet er beregnet til brug i.

Garanti undtagelser

- ABS plastik skærm og fodstøttens remme er brugsgenstande og ikke dækket af garantien.
- Dæk
- Polstring og sæde
- Reparationer og/eller ændringer foretaget ved enhver del, uden specifik forudgående skriftligt samtykke fra producenten.
- Forhold der rækker ud over producentens kontrol
- Arbejde, kundeservice kontakt, forsendelse og andre takster pådraget ved reparation af produktet, medmindre det er særligt autoriseret af producenten.

Skader forårsaget af:

- Misbrug, forkert brug, uheld, eller forsømmelighed
- Forkert brug, vedligeholdelse eller opbevaring
- Erhvervsmæssig brug eller brug ud over normalen

BILAG – SPECIFIKATIONER

HM303D SPECIFIKATIONER	
Samlet længde:	1137mm
Samlet bredde:	680mm
Samlet højde:	930mm
Samlet bredde sammenfoldet:	350mm
Sæde bredde:	445mm
Sæde dybde:	410mm
Ryglæn højde:	410mm
Gulv til sæde højde:	455mm
Forhjul diameter (tommer):	6"
Hovedhjul diameter (tommer):	22"
Maksimal sikker stigningsprocent	8.7%
Drejnings radius:	95.76cm
Testet vægt:	100 kg
Max brugervægt:	100 kg
Front udstyr:	Svingbare fodstøtter, justerbare benstøtter
Bremser:	Skub for at låse, træk for at låse op / parkeringsbremse eller håndbremser
Komponent vægt:	9,6kg uden fodstøtter. Med fodstøtter 10,65kg
Tilbehør:	Anti-tip hjul
Stillestående stabilitet forover (låste hjul)	15°
Stillestående stabilitet bagtil (låste hjul)	20°
Parkeringshjuls kraft 'Force2'	Venstre: 6,11 kg Højre: 6,11 kg

- 1 På grund af fabrikations tolerance og vedvarende produktforbedringer kan disse specifikationer være underlagt af en afvigelse på (+ eller -) 3%.

BEMÆRK: Dette produkt tilpasser sig ISO 7176 serie EN12183 standarder. Alle specifikationer kan ændres uden varsel



SeniorSam A/S

Sundbyvej 19

7752 Snedsted

Danmark

Tlf. 92725500

CVR: 33082037

info@seniorsam.dk

www.seniorsam.dk