



Brugervejledning.

Varenr. AC865 Badebænk med porskum sæde 42cm.

Varenr. AC864 Ryglæn til badebænk (ekstraudstyr).

Badebænken er beregnet til at bruge på badeværelset. Den er med til at give dig siddende støtte og sikkerhed, når du er i bad. Den er også velegnet til at sidde på ved på- og afklædning. Armlænene bruges som støtte, når du skal rejse og sætte dig.

1. Pak stolen ud og placer den på et stabilt underlag.
2. Klik benene på plads i den ønskede højde. Bemærk at du skal høre en kliklyd ved montering af hver af de 4 låseclips før benene sidder korrekt fast.
3. Sædehøjden kan altid justeres til en passende højde i henhold til brugerens højde. Pres blot låseclipsene ud og træk benene ud til den ønskede højde. Montér låseclips igen.
4. Montér ryglænet (ekstraudstyr) og tjek at det sidder ordentlig fast med de medfølgende låseclips. Nu er din nye badestol færdigsamlet og klar til brug.

Tekniske data:

Max. Brugervægt: 150 kg

Vægt: 2,7 kg

Sædebredde: 42 cm

Sædehøjde: 42-58 cm

Udvendigt mål: 52 x 53 x 42-58 cm

Sikkerhed og vedligeholdelse:

Før brug skal du kontrollere, at alle skruer er strammet korrekt, samt at badestolen står stabilt på underlaget.

Rengør badestolen regelmæssigt med et ikke slibende og ætsende produkt.

Ved spørgsmål, kontakt forhandler:

SeniorSam A/S

Sundbyvej 19

DK - 7752 Snedsted

info@seniorsam.dk

www.seniorsam.dk



Badebænk med pørsæde 42cm  

MODEL: CA3561L-W/AC865

 2023-05-09  20230509  20230509

    




(01)69722280020001JF

 **FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO.,LTD**
Pingnan Industrial Area , Guicheng Nanhai District , 528251 Foshan
City,Guangdong P.R. China
Tel: +86-757-81816518 Fax : +86-757-81816523
E-mail: info@caremax-med.com Web Site: www.caremax-med.com

 **SUNGO Europe B.V.**
Fascinatio Boulevard 522,Unit 1.7,2909VA
Capelle aan den IJssel,The Netherlands
SRN: NL-AR-00000247

Doc No.: CE-MDR-TCF001-07 Rev: A/0

Ryglæn til Badebænk  

MODEL: CA3561L/AC864

 2023-05-09  20230509  20230509

    




(01)69722280020001JF

 **FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO.,LTD**
Pingnan Industrial Area , Guicheng Nanhai District , 528251 Foshan
City,Guangdong P.R. China
Tel: +86-757-81816518 Fax : +86-757-81816523
E-mail: info@caremax-med.com Web Site: www.caremax-med.com

 **SUNGO Europe B.V.**
Fascinatio Boulevard 522,Unit 1.7,2909VA
Capelle aan den IJssel,The Netherlands
SRN: NL-AR-00000247

Doc No.: CE-MDR-TCF001-07 Rev: A/0